

Účel

Světlem vytvrzovaný materiál k překrytí/izolování dásní u zubů, které jsou běleny při ordinačním bělení zubů.

Charakteristika výrobku

OliGingiva PROTECTOR je světlem vytvrzovaný materiál a používá se podobně jako kofferdam k izolaci dásní od zubů při ordinačním bělení zubů.

Cílová skupina pacientů

Všichni pacienti, kteří podstoupí bělení zubů vysoce koncentrovaným bělícím gelem v zubní ordinaci. OliGingiva PROTECTOR slouží jako ochranná bariéra a aplikuje se před bělením zubů.

Uživatelé

Ošetření v zubní ordinaci zubním lékařem.

Složení

Obsahuje alifatický uretan dimetakrylát, tetramethylen dimetakrylát, skelný prášek, iniciátory světelné polymerace, stabilizátory, pigment.

Indikace

K ochraně dásní při ordinačním bělení zubů.

Kontraindikace

Pokud je pacient alergický nebo přecitlivělý na některou ze složek tohoto přípravku, neměl by jej používat nebo jej může používat pouze pod přísným dohledem lékaře/zubního lékaře.

Varování

Obsahuje alifatický uretan dimetakrylát, tetramethylen dimetakrylát. Může vyvolat kožní senzibilizační reakci.

Bezpečnostní pokyny

Vyhnete se vdechování výparů/rozstřiku. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc.

Vzájemné působení s jinými zdravotnickými prostředky

Před použitím výrobku by měl zubní lékař vzít v úvahu známé interakce a křížové reakce zdravotnického prostředku s jinými materiály, které se již nacházejí v ústech pacienta.

Aplikace / vývoj**Příprava**

Použijte vhodné prostředky (např. retraktor na tváře a rty), abyste zajistili, že jazyk a rty budou během zákroku (a během následného bělení) znehybněny a nepřijdou do kontaktu s materiálem. Odstraňte uzávěr ze stříkačky a nasadte aplikační špičku. Zkontrolujte, zda materiál volně vytéká.

Aplikace

Osušte dásně. Podél místa aplikace naneste vrstvu přípravku OliGingiva PROTECTOR širokou přibližně 4-6 mm a hlubokou 2 mm. (Foto 1) Materiál vtlačte do mezizubních prostor. Vytvrzujte standardní polymerační lampou. Polymerujte po dobu 20 až 40 sekund a dbejte na to, abyste lampu nenechávali na stejném místě příliš dlouho. Přebytný materiál, který na zubech zůstal po vytvrzení, opatrně odstraňte skalpelem. Nyní můžete nanést bělící gel. (Foto 2)

Dokončení

Po dokončení bělení odstraňte OliGingiva PROTECTOR. Pomocí nástroje (např. sondou) materiál na jednom konci pákou nadzvedněte a odstraňte. Odstraňte aplikační špičku a uzavřete stříkačku uzávěrem. (Foto 3)

Skladování a použití

Po použití výrobek ihned zavřete. Skladujte při teplotě 3 °C - 25 °C.

Doba trvanlivosti

Maximální doba trvanlivosti je vytištěna na štítku stříkačky. Nepoužívejte po uplynutí doby trvanlivosti.

Nežádoucí účinky

Při vhodné přípravě a používání tohoto zdravotnického prostředku jsou nežádoucí účinky velmi vzácné. Imunologické reakce (např. alergie) nebo lokální diskomfort však obecně nelze zcela vyloučit. Všechny závažné události, které se vyskytnou v souvislosti s používáním tohoto výrobku, by měly být hlášeny níže uvedenému výrobcí a příslušným orgánům.

Pokyny k likvidaci

Zbýlé množství a obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními a/nebo zákonnými předpisy.



Foto: 1



Foto: 2



Foto: 3



Zdravotnický prostředek



MANI Medical Germany GmbH
Hertha-Sponer-Strasse 2
61191 Rosbach / Německo

CE0297