

**Obchodní název:** Rhapsody flow Prophylaxis Powder (Powder for Air-Flow)

### Popis

Profylaktický prášek pro systémy Air-Flow. Určeno pro profesionální čištění zubů. Vyrobeno na bázi jemně zrnitých částic hydrogenuhličitanu sodného. Průměrná velikost zrna částic je 40 mikronů. Prášek se používá k odstranění mírně mineralizovaného zubního plaku a biofilmu ze supragingiválního povrchu zubů. Jemně zrnité částice a rozmanitost příchutí učiní proces čištění pro pacienta příjemnějším.

### Indikace

Prášek je vyroben pro profylaktické čištění supragingiválního povrchu zubů od biofilmu a zubních usazenin pomocí vzducho-abrazivních zařízení typu Air-Flow.

- Odstranění hustého pigmentového plaku, včetně kuřáckého plaku.
- Preparace povrchu před umístěním kompozitních náhrad s výplňovými materiály.
- Preparace povrchu před lepením/cementováním inlejí, onlejí, korunek a fazet.
- Hygienické čištění před bělením, fluoridací, pečetěním fisur.

### Výhody

- Maximální komfort pro pacienta. Průměrná velikost částic je 40 mikronů, zatímco podobné prášky od jiných výrobců mají velikost částic 65–100 mikronů. Menší částice jemně působí na sklovinu a snižují riziko poranění měkkých tkání.
- Vysoká účinnost odstraňování plaku. Prášek hydrogenuhličitanu sodného je nejlepší pro odstranění nejen biofilmu, ale i mírně mineralizovaného zubního plaku.
- Kompatibilní se všemi značkami vzduchových abrazivních systémů. Prášek má nejlepší poměr ceny a kvality. Vynikající vlastnosti umožňují použití s jakýmkoli vzduchovým tryskacím zařízením bez rizika poškození. Speciální přísady zabraňují slepování částic a ucpávání a kontaminaci zařízení.
- 7 příchutí: Neutral, Černý rybíz, Třešeň, Máta, Citron, Jahoda, Tropic.

### Aplikace

Profylaktický prášek Rhapsody se používá výhradně k čištění supragingiválních povrchů zubů.

### Obecné pokyny

- Čištění se provádí vzducho-abrazivními zařízeními typu Air-Flow libovolného výrobce. Dávkovací hroty jsou vybírány na základě doporučení výrobce zařízení.
- **Kontraindikace:** onemocnění horních cest dýchacích (i v ordinaci), infekční onemocnění (včetně AIDS, hepatitidy), nutnost diety bez soli a užívání léků ovlivňujících metabolismus solí, těhotenství.
- Při práci se zařízením Air-Flow by měl lékař nosit masku a rukavice. Lékař i pacient musí nosit ochranné brýle. Pro ochranu měkkých tkání naneste na rty a dásně vazelínu.

- Tento prášek je vyroben pouze pro ošetření supragingiválního povrchu zubu.
- Špička kanyly by měla být ve vzdálenosti 3–5 milimetrů od ošetřovaného povrchu. Proud abraziva by měl směřovat od gingivy pod úhlem 60°–90°. Zabraňte vniknutí abrazivního proudu do gingiválního okraje! To bude mít za následek významné poškození tkáně.
- Ošetření provádějte krouživými pohyby, aniž byste zůstali na jednom místě déle než 5 sekund.
- Po odstranění usazenin vyleštíte povrch skloviny leštící pastou s indexem RGA nejvýše 15.
- Dvě hodiny po zákroku se nedoporučuje kouřit a konzumovat potraviny a nápoje, které mohou způsobit zbarvení zubů.

### **Specifikace**

- Složení: hydrogenuhličitan sodný, oxid křemičitý, sladidla, aroma.
- Balení: plastová láhev s uzávěrem.
- Hmotnost prášku v láhvi je 300 gramů.

### **Skladování**

Skladujte při teplotě do 30 °C a relativní vlhkosti 10 až 90 %. Chraňte před kyselinami. Nezahřívejte, nedávejte dětem. Datum spotřeby je uvedeno na obalu. Nepoužívejte produkt s prošlou expirací. Chraňte před slunečním zářením a vlhkostí.

### **VÝROBCE**

Queen Dental GmbH ("Queen Dental GmbH")  
Neo Strasse 67, 99846, Seebach, Německo  
Telefon: +49 36929 133948  
E-mail: info@queen-dental.de

### **MÍSTO VÝROBY**

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Německo  
Neo Strasse 67, 99846 Zeebakh, Německo

### **Dovozce a distributor:**

Janouch Dental s.r.o.  
Hradištská 161  
735 62 Český Těšín  
info@janouch-dental.cz  
+420 604 251 198

