

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Profesionální domácí zubní bělení pro kosmetické použití
16% peroxid karbamidu
The Smile Soft

1. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Tento produkt je systém domácího bělení založený na sofistikovaném gelu s farmaceutickou čistotou a příjemnou mátovou vůní. Gel vykazuje konzistenci a optimální přilnavost k zubním povrchům, což umožňuje postupně a rovnoměrně uvolňování účinné látky. Produkt je balen ve stříkačkách. Obsahuje také ionty draslíku, které snižují citlivost zubů. PH produktu je na fyziologické hodnotě $\approx 6,7$, čímž je zajištěna ochrana skloviny. Použití tohoto produktu je pod kontrolou a dohledem zubaře. Produkt musí být skladován v teplotním rozmezí 15-2 °C.

2. NÁZEV VÝROBKU A OBSAH BALENÍ

Společný obsah sady: 2 fólie EVA (Erkoflex) + 5 aplikačních koncovek + 3 malé štětky, + 5 stříkaček bělicího gelu, jak je uvedeno:

Smile Soft 16% karbamidperoxid obj.č. CK16

3. ÚČEL POUŽITÍ

Výrobek se používá k bělení zubů, které potřebují světlejší a jasnější barvu, pod dohledem stomatologa jako platná neinvazivní alternativa bělení ve srovnání s ošetřením fasetami atd. Protože výplňové materiály nepodstupují „bělicí účinek“ se doporučuje provést bělení zubů před provedením výplně a poté se pokusit jednotnou barvu výplně. Doporučuje se také počkat alespoň týden, než zasáhnete do náhrady.

4. OBECNÉ INFORMACE

Věnujte pozornost balení. Informujte pacienta o délce denní léčby. Pečlivým dodržováním pokynů je dosaženo výsledků již po několika dnech. Ideálním předpokladem je měkký a tenký materiál individuálních nosičů (Erkodent), které jsou pohodlnější a také výrazně snižují citlivost zubů a zabírají méně interokluzního prostoru v ústech pacienta.

5. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

1. Nepoužívejte u pacientů mladších 18 let. 2. Výrobek lze prodávat pouze zubním lékařům. U každého léčebného cyklu musí být první použití provedeno pouze zubním lékařem nebo pod jeho přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Teprve poté je pacientovi k dispozici pro dokončení léčebného cyklu. 3. Zkontrolujte datum expirace vytisknuté na vnějším obalu.

6. POSTUP

Před zahájením léčby:

Důkladně vyšetřete ústa a zuby pacienta a ujistěte se, že jste odstranili a vyřešili všechny stávající problémy a patologie, včetně nedokonalé nebo poškozené výplně • provést přesnou anamnézu a přesné objektivní vyšetření; • Odstraňte veškeré aktuální zubní patologie. • Dokonale vyčistěte zuby.

Postup: 1. Vytvořte si vlastní nosiče EVA podle laboratorních pokynů. 2. Opatrně odšroubujte víčko injekční stříkačky. 3. Připojte dávkovač špiček k injekční stříkačce mírným otočením ve směru hodinových ručiček. 4. Vložte gel nalitým souvislým proužkem gelu přibližně do poloviční výšky (nebo mírně nižší) od incizálního okraje na obličejové straně nosiče, od moláru k moláru. Tato aplikace by neměla ubrat více než 1/3 injekční stříkačky. Po použití stříkačky znovu uzavřete a až do dalšího ošetření ji uložte na chladném místě. Délka léčby se u jednotlivých pacientů liší. Produkt musí být používán minimálně 3 hodiny / den pro 16% koncentraci peroxidu karbamidu a nejméně 2 hodiny / den pro 6% koncentraci peroxidu vodíku. Alternativně, na základě potřeb pacienta, produkt lze aplikovat po dobu nejméně 1 hodiny se 3 nebo 2 denními aplikacemi. Vzácně může citlivost zubů a / nebo podráždění dásní vyžadovat lékařské ošetření. Zkontrolujte pacienty po 3-5 dnech léčby. Zubní lékař rozhodne, zda bude provádět častější kontroly na základě pacientovy potřeby. Počet dní potřebných k dokončení léčby závisí hlavně na typu zbarvení a rozhodne o něm zubní lékař na základě reakce pacienta. Orientačně se očekává 5-10 aplikací pro 16% PC gel, zatímco 1-2 pro 6% PC gel. Počet dní potřebných k dokončení léčby závisí hlavně na typu zbarvení a rozhodne o něm zubní lékař na základě reakce pacienta. Orientačně se očekává 5-10 aplikací pro 16% PC gel, zatímco 1-2 pro 6% PC gel.

7. KONTRAINDIKACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kontraindikace: • Známá alergie na jednu ze složek přípravku • Děti do 18 let; • Pro ženy, které jsou těhotné nebo kojí. • V případě, že pacient vykazuje vážné problémy s citlivostí, musí být léčba okamžitě přerušena a musí být zahájena vhodná terapie. • Neošetřujte pacienty se závažnými problémy s dásněmi nebo s problémy se zuby, které mohou způsobit citlivost zubů nebo které umožňují penetraci gelu do zubu (například: lidé s již existující recesí dásní, odkrytým dentinem, nezakrytými kořeny, zuby s mikrozlomeninami, otevřený kaz, volná zubní výplně)

Bezpečnostní opatření pro použití: • jevy omezené a dočasné demineralizace skloviny jsou běžně spojovány s jakýmkoli systémem bělení zubů • hodnoty mineralizace zubů pacienta budou přirozeně a postupně stoupat na správné hodnoty pro přirozené rekonstrukční působení metabolismu. • mineralizace může být urychlena pouze tehdy, je-li to stomatologem považováno za vhodné, použitím specifických následných terapií. • Pacienti, kteří mají problémy se zuby, které mohou způsobit citlivost zubů nebo které umožňují penetraci gelu do zubu (například: lidé s již existující citlivostí, recesí dásní, odkrytým dentinem, nezakrytými kořeny, zuby s mikrozlomeninami, otevřený kaz, volné zubní výplně).

8. PRVNÍ POMOC

V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO KONTAKTU S KŮŽÍ, MĚKKOU TKÁNÍ A MUCOSOU: okamžitě umyjte a důkladně a opakovaně opláchněte. Pokud příznaky přetrvávají, co nejdříve se poradte s odborným lékařem.

KONTAKT S OČIMI: Dobře otevřete oči a 15 minut je omyjte tekoucí vodou. Pokud příznaky pálení přetrvávají, co nejdříve se poradte s odborným lékařem.

POŽITÍ: Při požití vypláchněte ústa vodou, kloktejte slanou vodou a vypijte velké množství mléka. Pokud příznaky přetrvávají, okamžitě vyhledejte odborného lékaře.

9. Legenda symbolů na štítku

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Odkaz na kód produktu		Hazardování se zdravím
	Číslo šarže		Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Před použitím si přečtěte pokyny		Po použití se nerozptylujte do okolního prostředí
	Expirace		Limity skladovací teploty
	Výrobce		Uchovávejte mimo dosah dětí

Rev.00 06/11 // 2020

Health & Beauty Oasis S.r.l.: sídlo: Corso Milano, 83 35139 Padova (Itálie) DIČ 04547970287 e-mail: info@unicagroup.it

Dodavatel ČR: Janouch Dental s.r.o. Hradištská 161 Český Těšín 604251198

E-mail VA 04547970287: info@unicagroup.it