

PoloDent Cold Spray je vhodný pro rychlé zmrazení pěnových pelet, pro testování vitality zubů v zubním lékařství a pro chlazení otiskovacích materiálů, jako jsou hydrokoloidy apod.

Poznámky k aplikaci: Chladicí sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 2-3 cm po dobu 1-2 sekund. Nepoužívejte přímo v ústech, hrozí nebezpečí zmrazení! Používejte pouze venku nebo v dobře větráných místnostech.

Bezpečnostní pokyny: H 222 - H 229
Extremně hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: Při zahřátí může explodovat. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Nepronázejte ani nespalujte, a to ani po spotřebování. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky k událostem: Všechny závažné události týkající se prostředku musí uživatel/pacient hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel/pacient registrován.



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Prisma GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-8
64653 Lorsch, Germany
+49 6251 8669800



POLO DENT[®]

A N A E S T H E T I C S

CZ Chladicí sprej s pomerančovou příchutí


Cold Spray
ORANGE



200 ml e

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Písek
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

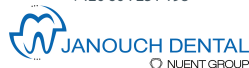

Nebezpečí



viz spodní
strana
plechovky



20 45 10



UFI: RHV8-M0Q4-710E-06D7



2023-10