

cz Sterilní jednorázové stomatologické injekční jehly

Jehly pro stomatologické použití se závitovým hubem pro kartušové stříkačky, sterilní, potažené silikonem, jednorázové, netoxické a nepyrogenní, v neotevřeném a nepoškozeném balení. Svařovací bod spojující uzávěr s protektorem zajišťuje zachování sterility jehly.

POKYNY K POUŽITÍ:

Umístění jehly na stříkačce:

- 1) Porušte ochrannou pečeť.
- 2) Zatáhněte a zároveň otočte, abyste sejmuli uzávěr.
- 3) Našroubujte závitovou základnu na stříkačku a dávejte pozor, abyste neodstranili protektor.
- 4) Těsně před anestézií sejměte protektor mírným otáčivým pohybem.

Po použití

- 1) Opatrně vyjměte jehlu ze stříkačky, aby nedošlo k náhodnému propíchnutí.
- 2) Použitou jehlu ihned zlikvidujte do vhodného kontejneru v souladu s předpisy, aniž byste ji ohýbali, lámali nebo s ní jakkoli jinak manipulovali.

VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte, je-li ochranná pečeť poškozená.
- Nepoužívejte opakovaně, jinak hrozí riziko křížové infekce.
- Nenasazujte rukou znovu uzávěr, mohlo by dojít k náhodnému píchnutí.
- Jehlu neohýbejte ani na ni nevyvíjejte nadměrný tlak, protože by mohlo dojít k vážnému poranění vás a/nebo pacienta.
- Pokud v souvislosti s tímto prostředkem došlo k jakékoli závažné události, měl by ji uživatel nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je registrován.

UPOZORNĚNÍ:


Až do použití uchovávejte v původním obalu. Skladujte při pokojové teplotě a chraňte před vlhkostí. Pouze k profesionálnímu použití ve stomatologii k podávání anestetik.

cz Sterilní jednorázové stomatologické injekční jehly

INDIKACE: Tyto jehly by měli používat pouze zubní lékaři k provádění lokální dentální anestezie.

IMB59EO - verze 09/2022

Výrobce:

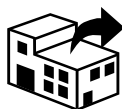

Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Tecnofar S.p.a.
Via della Battaglia 17/20
23014 Delebio (SO), Italy

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



STERILE EO



CE
0426

verze 17-2209

