

Etch Gel

PHOSPHORIC ACID

Leptací gel na bázi
kyseliny fosforečné

Poznámky k použití:

Leptací gel kyseliny fosforečné pro úpravu zubní skloviny a dentinu ve stomatologii.

Bezpečnostní pokyny:

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně je několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsahuje kyselinu orthofosforečnou.

Popis produktu:

Leptací gel PoloDent na bázi 35/38 % kyseliny fosforečné se vyznačuje optimálním tixotropním tokem. Používá se k leptání zubní hmoty v rámci techniky leptání skloviny a techniky totálního leptání. Podle současných poznatků nemá výrobek při dodržení bezpečnostních a aplikačních pokynů žádné vedlejší účinky. Podvýplňové materiály mohou být leptacím gelem rozpuštěny během delší doby expozice.

- Pouze pro stomatologické použití!
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
- Po použití stříkačku ihned uzavřete!
- Aplikační stříkačku a kanylu lze použít pouze jednou.

Pokyny k použití:

Naplnění prázdné aplikační stříkačky:

Prázdná aplikační stříkačka se připojí k přírodní stříkačce pomocí adaptéru (otočte o 180° ve směru hodinových ručiček). Malá injekční stříkačka se naplní opatrným a pomalým stlačením pístu velké injekční stříkačky.

POLODENT®

COMPOSITE

V případě potřeby současně trochu zatáhněte za píst malé injekční stříkačky a ujistěte se, že malá injekční stříkačka není přeplněná nebo že píst není vytlačen ze stříkačky!

Poté se malá aplikační stříkačka oddělí od adaptéru a 50 ml stříkačka se pevně uzavře. Kanyla se našroubuje na aplikační stříkačku ve směru hodinových ručiček a utáhne se. Leptací gel lze nyní snadno aplikovat opatrným stisknutím pístu stříkačky. Naplněná aplikační stříkačka a aplikační kanyla jsou určeny pro jednorázové použití u jednoho pacienta; stříkačka se nesmí znovu naplnit.

Při použití doplňkových aplikačních stříkaček musí být datum použitelnosti a číslo šarže doplňovací stříkačky ručně přeneseno na štítek naplněné aplikační stříkačky.

Preparace:

Oblasti zubní hmoty, které se mají leptat, musí být jasně ohraničeny.

1.) Doporučujeme použít kofferdam! Je třeba zabránit jakémukoli kontaktu s měkkými tkáněmi (kůže, ústní sliznice, oči atd.). Pokud se leptací gel dostane na měkké tkáně, okamžitě místo opláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby kontaktujte lékaře.

2.) Před preparací vyčistěte zub pomocí gumového kalíšku a leštící pasty bez fluoridu a oleje.

3.) Pomocí vody důkladně odstraňte zbytky po čištění, vyčistěte a vysušte povrch zubu stlačeným vzduchem bez oleje.

4.) Připravte kavitu odpovídajícím způsobem; zkoste naleptané hrany, abyste dosáhli trvalých sklovinných spojů. Kavitu důkladně vypláchněte vodou a vysušte stlačeným vzduchem bez oleje. Nevysušujte nadměrně!

5.) Chraňte zubní dřev v hlubokých kavitách (např. překryjte tenkou vrstvou vhodného podkladového materiálu). Kavita by měla být suchá a bez kontaminace, přitom je třeba zabránit nadměrnému vysušení dentinu.

Proces leptání

6.) Naneste leptací gel na okraje skloviny v kavitě a v případě potřeby i na dentin.

Doporučená doba aplikace:

15 - 30 s na zubní sklovině

10 - 15 s na dentinu

50 - 80 s na mléčných zubech a zubech s vysokým obsahem fluoridu

7.) Oplachujte vodou po dobu nejméně 20 sekund, neměl by zůstat žádný leptací gel.





8.) Vysušte stlačeným vzduchem bez obsahu oleje a vody. Leptané plochy se nesmíte dotýkat ani ji znečišťovat slinami, dokud není ošetření dokončeno. Pokud by však po leptání a vysušení došlo ke kontaminaci, je třeba oblast znovu krátce leptat (cca 10 s).

Leptaná sklovina by měla být křídově bílá! Po leptání můžete pokračovat v nanášení adheziv apod. v souladu s návodem k použití od výrobce.

Likvidace

Menší množství leptacího gelu zředěného vodou lze likvidovat prostřednictvím kanalizace. Nevyčištěný obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Všechny závažné incidenty týkající se prostředku musí uživatel/pacient hlásit výrobci a příslušnému orgánu daného státu.

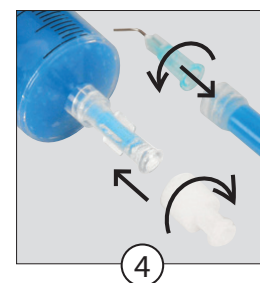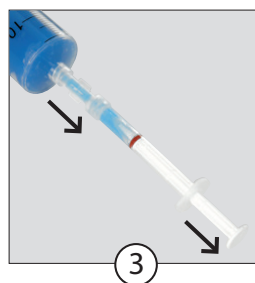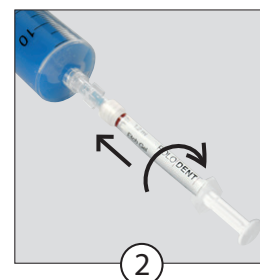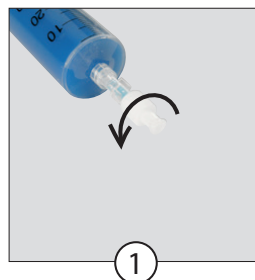

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.

Malá Dlážka 17


750 02 Přerov

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198



Nebezpečí

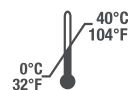

Polo MB Oisterwijk BV

Laarakkerweg 5

5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Prisman GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-8

64653 Lorsch, Germany

+49 6251 8669800



Poslední revize návodu:

/01/23 Rev.2023-05