

**3TECH**

PROFYLAKTICKÝ PRÁŠEK

CITRON - 65 µm

Profylaktický prášek se používá s dentálními vzduchovými lešticími a mikroblasterovými přístroji k odstranění zubního plaku, zubního kamene atd.

1. Hlavní složení

Bikarbonát sodný (< 65 µm), hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný a potravinářské aroma.

2. Způsob použití

- Před otevřením uzávěru lahvičkou 3-5krát zatřepejte.
- Otevřete uzávěr a nasypete příslušné množství prášku do zásobníku prášku zařízení podle stavu ústní dutiny pacienta a poté uzávěr utáhněte.
- Aktivujte zařízení a zároveň trysku s povrchem zubu pacienta, zahajte scaling.

3. Kontraindikace

- Za žádných okolností by tento prášek neměl být aplikován pacientům s chronickou bronchitidou nebo astmatem.
- Tento prášek by se neměl používat k ošetření pacientů s nízkosodíkovou dietou.
- Esence obsažená v prášku může za určitých podmínek vyvolat alergickou reakci. Nepoužívejte tento prášek u pacientů, o kterých je známo, že jsou alergičtí na esenci.
- Neaplikujte přímo na výplně, korunky a můstky, protože by to mohlo dojít k jejich poškození.
- Je zakázáno aplikovat prášek subgingiválně.

4. Skladování a trvanlivost

- Prášek by neměl být skladován v blízkosti kyselin a zdrojů tepla.

- Skladujte na suchém, tmavém místě při teplotě mezi -10 °C a 40 °C.
- Trvanlivost: Tři (3) roky od data výroby.
- Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.

5. Rady k ošetření

- Před ošetřením aplikujte pacientovi na ret vazelínu.
- Pacient i lékař by měli mít během ošetření nasazené ochranné brýle.
- Při aplikaci se doporučuje mít nasazenou ochranu úst.
- Používejte rychlé odsávací zařízení k absorpci nastříkaného prášku během ošetření.

6. Bezpečnostní opatření

- Po ošetření nedávejte zbývající prášek zpět do lahvičky s práškem.
- Po otevření lahvičky s práškem ji včas zakryjte uzávěrem a utáhněte, aby byl prášek chráněn před vlhkostí.
- Když zařízení na leštění vzduchem nepoužíváte, vyčistěte nádrž na prášek. Hromadění prášku by mohlo vést k zablokování zařízení.

7. Přeprava

- Během přepravy se vyvarujte smíchání s kyselinami a nebezpečným zbožím.
- Během přepravy se vyhněte slunci, dešti a sněhu.

8. Ochrana životního prostředí

Tento produkt neobsahuje škodlivé přísady a může být zlikvidován a zničen v souladu s místními předpisy.



3TECH

PROFYLAKTICKÝ PRÁŠEK

CITRON - 65 µm



Dovozce



Trvanlivost



Chraňte před slunečním zářením




Výrobce



Udržujte v suchu



Viz návod k použití

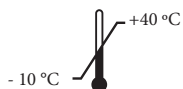

Teplotní limity



Zdravotnický prostředek



Před použitím protřepejte



Označení pro trh Evropského společenství



Referenční číslo



Zástupce v Evropském společenství



Datum výroby



Číslo šarže



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster,
GERMANY



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone,
Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China



CADENCE
2 bis, chemin du Loup 93290 Tremblay-en-France
FRANCE

Váš dodavatel:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



JANOUGH DENTAL