

Universal Oil Spray

500 ml

POLO|DENT®

Univerzální mazací sprej pro údržbu všech stomatologických násadců včetně vysokorychlostních, nízkorychlostních a vzduchových motorů. Obsahuje bílý minerální olej se stopou mátového oleje.

Návod k použití: Bezprostředně po každém použití a před sterilizací jej vložte do zadní části násadce a stříkejte po dobu jedné až dvou sekund. Přebytek důkladně otřete. Důležité: Při používání držte nádobku ve svislé poloze. V případě potřeby se řiďte pokyny k údržbě násadce. Používejte pouze podle pokynů. Pouze pro profesionální použití.

Upozornění: H222: Extrémně hořlavý aerosol. H229: Nádobka pod tlakem: při zahřátí může explodovat. P211: Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení.

Skladování: P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C.

Kontraindikace: P210: Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření.

Likvidace: P251: Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.

Jakákoli závažná událost související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být nahlášena výrobcí a příslušným orgánům.



Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.

Malá Dlážka 17

750 02 Přerov

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198



REF 51 86 00



LOT



Číslo šarže a datum
expirace viz plechovka

UFI: CW10-G031-P001-5P9X



Upozornění

 Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands

650 **3**

