



# Budget Line

## CLAMP RING

### Produkt # Popis

63 09 12 Budget Line Clamp Ring, small

63 09 14 Budget Line Clamp Ring, medium

#### Indikace / zamýšlené použití:

Zajištění sekční matrice a separace zubů s dobrou fixací.

#### Složení:

NiTi kroužky s koncovkami.

#### Bezpečnostní opatření:

1. Tento výrobek je určen zubním lékařům nebo zdravotníkům pro účely ošetření ústní dutiny.
2. Síla pro rozevření kroužků nesmí překročit pružnost nitinolu. Roztažení kroužků nesmí být větší než 10 mm, aby nedošlo k prasknutí.
3. Před použitím zakryjte ošetřovanou plochu kofferdamovou blánou.
4. Kroužky se nasazují pomocí kleští. Kroužek je nutné uchopit špičkami kleští na určených místech a rozevřít tak, aby nevypadl.
5. Metoda sterilizace: Všechny modely lze sterilizovat po dobu 5 minut při vysoké teplotě (134 °C) a vysokém tlaku.

#### Návod k použití:

1. Uchopte kroužek kleštěmi na příslušných místech z vnitřní strany a rozevřete jej na požadovanou šířku,
2. Zaveďte kroužek do mezizubního prostoru, uvolněte jej a zajistěte matrici u zubu,
3. Po ošetření rozevřete kroužek kleštěmi a vyjměte jej.

#### Skladování:

Nevystavujte výrobek slunečnímu záření a zamezte kontaktu s žíravými materiály.

#### Doba použitelnosti:

5 let



Polo MB Oisterwijk BV  
Laarakkerweg 5  
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



TANGSHAN ZHENG TONG EXHIBITION CO., LTD.  
NO.24 Chaoyang Road, Lubei District,  
Tangshan City, Hebei Province, China



EU REP SUNGO Cert GmbH.  
Harffstraße 47,  
40591 Düsseldorf, Germany

#### Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.  
Malá Dlážka 17  
750 02 Přerov  
info@janouch-dental.cz  
+420 604 251 198

