

Dezinfekční ubrousky Maxi

20 x 20 cm

Čistící ubrousky na povrchy

0%
alkoholu

200 kusů



Speciálně vyvinutý pro použití v lékárně a zubní lékařství. Obsahuje čisticí prostředek. K povrchové dezinfekci zdravotnických prostředků, mimo jiné včetně stomatologických křesel, vyšetřovacích světel a zařízení pro přepravu pacientů. Není určeno k použití na lékařské a zubní nástroje.



Pro dezinfekci povrchů. Obsahuje detergent. Používejte biocidy bezpečně a udržitelně.

Tento produkt by měl být používán v souladu s etiketou produktu. PT2 typ: AL.

Návod k použití: 1. Odstraňte víčko tuby, 2. Ustříhnete horní část vzduchotěsného plastového sáčku, 3. Protáhnete středový ubrousek otvorem ve víčku a nasadíte ho, 4. Vytáhnete ubrousek pod úhlem 45°. Použitím dostatečného množství ubrousků otřete čisté povrchy, které mají být dezinfikovány, tak, aby byly zcela navlhčené, a nechte dezinfekční prostředek působit po dobu 60 sekund. Nechte povrchovou vlhkost vyschnout nebo otřete čistým hadříkem. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost (60 sekund): Baktericidní. Kvasinkocidní. Virucidní aktivita proti obaleným virům: Virus Vaccinia, virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV), virus hepatitidy Delta, HIV, virus chřipky, koronavirus, herpesviridae, filoviridae (Ebola), zarděnky, vztekliny, spalničky, poxviridae.

Testováno podle standardů: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Složení: voda, alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0,48 % hm. (4,8 g/kg), didecyldimethylamonium chlorid (7173-51-5) 0,22 % hm. (2,2 g/kg), parfém.

Varování. H412: Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

První pomoc. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Doporučuje se používat ochranné rukavice.

Skladování. P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. P273: Uchovávejte v chladu.

Kontraindikace. Neslučitelné materiály: měkká ocel, hliník, měď.

Likvidace. Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevylévejte kapalinu do kanalizace nebo řek. Nesplachujte. Nemacerovatelné.

Jakýkoli vážný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být hlášen výrobci a příslušným orgánům.

Dezinfekční ubrousky Maxi

20 x 20 cm



Spotřebujte do: Přidejte datum expirace z doplňovacího sáčku

Tuba znovu naplněna x
(vyměňte tubu po 6 naplněních)

1 2 3 4 5 6



LOT



viz sáček

UFI: 2520-0057-K00H-5Q24



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

Držitel oprávnění:

EC	REP	DIRECTA AB P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27 Upplândia Väsby, Sweden
----	-----	--



1639