

POLO DENT®

Sprej pro dezinfekci povrchů

K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

1 |



Nebezpečí

REF 83 00 24



UFI: EE00-V0C9-F00M-WVDU



viz obal



MD

Pro povrchovou dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků. Alkohol se nedoporučuje používat na dentální/lékařské nástroje.

BPR

Pro dezinfekci povrchů. Používejte biocidy bezpečně a udržitelně. Tento produkt by měl být používán v souladu s etiketou produktu. PT2 Typ receptury: AL.

Návod k použití: Nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byly povrchy zcela navlhčeny, a nechte působit 60 sekund. Povrchovou vlhkost nechte odpařit. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost (60 sekund): Baktericidní včetně VRE. Kvasinkocidní. Mykobaktericidní. Tuberkulocidní. Zahrnuje: Neobalené viry: myší norovirus, adenovirus 5. Obalené viry: virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV), virus hepatitidy delta, virus HIV, virus chřipky, koronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), zarděnky, vzteklna, spalničky, Poxviridae.

Testováno podle standardů: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13697, EN 13624.

Složení: ethanol (64-17-5) 63 % hm. (630 g/kg), voda, parfém.

Nebezpečí:

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Poskytnutí první pomoci:

P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

Pro nahlášení otravy kontaktujte Toxikologické informační středisko (TIS).

Postupy při požáru:

P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu nebo oxid uhličitý.

Skladování:

P210: Uchovávejte mimo dosah vysokých teplot, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě.

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

P235: Uchovávejte v chladu.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.

Hradištská 161

735 62 Český Těšín

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198



Kontraindikace:

Neslučitelné materiály: měď, hliník.

Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol.

Likvidace:

Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Nevypouštějte do kanalizace nebo řek.

Jakýkoli závažný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být nahlášen výrobci a příslušným orgánům.