

POLO|DENT|®

Dezinfekce povrchů bez alkoholu

K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ



alkoholu

2,5 l

REF 83 00 26



UFI: 2520-0057-K00H-5Q24

LOT



viz obal



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

Držitel oprávnění:

EC	REP	DIRECTA AB P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
----	-----	---

BPR

MD

CE
1639

MD

Speciálně vyvinutý pro použití v lékařském a dentálním prostředí. Obsahuje detergent. Pro povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků, včetně, ale nejen, zubařských křesel, vyšetřovacích světel a zařízení pro transport pacientů. Není určeno k použití na lékařské a dentální nástroje.

BPR

Pro dezinfekci povrchů. Obsahuje detergent. Používejte biocidy bezpečně a udržitelně. Tento produkt by měl být používán v souladu s etiketou produktu. PT2 Typ receptury: AL.

Návod k použití: Nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byly povrchy zcela navlhčeny, a nechte působit 60 sekund (pro dosažení plného účinku nechte působit 5 minut). Nechte povrchový sprej zaschnout nebo jej otřete čistým hadříkem. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost: Baktericidní (5 minut). Kvasinkocidní (5 minut). Virucidní aktivita proti obaleným virům (60 sekund): virus Vaccinia, virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV), virus hepatitidy delta, virus HIV, virus chřipky, koronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), zarděnky, vzteklna, spalničky, Poxviridae.

Testováno podle standardů: EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13697, EN 13624.

Složení: voda, alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0,48 % hm. (4,8 g/kg), didecylmethylamonium chlorid (7173-51-5) 0,22 % hm. (2,2 g/kg), parfémy.

Varování:

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Poskytnutí první pomoci:

P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Doporučuje se nosit ochranné rukavice.

Skladování:

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
P235: Uchovávejte v chladu.

Kontraindikace:

Neslučitelné materiály: měkká ocel, hliník, měď.

Likvidace:

Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevypouštějte kapalinu do kanalizace nebo řek.

Jakýkoli závažný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být nahlášen výrobcí a příslušným orgánům.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

