

POLO DENT®

Dezinfekce sacích systémů KONCENTRÁT

2,5 l

**Nebezpečí****REF 83 00 30****UFI: J110-E062-M003-J8G9****LOT**

viz obal



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

MD
CE
1639
EC**REP**

DIRECTA AB
P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27
Upplands Väsby, Sweden

Dovozce a distributor:


Janouch Dental s.r.o.

Hradištská 161

735 62 Český Těšín

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198

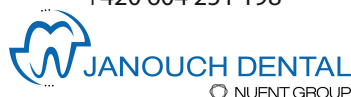

Pro každodenní čištění a údržbu dentálních odsávacích systémů. Lze použít na sacích systémech s mokrým, suchým a polo- mokrým/ suchým vedením.

Návod k použití, denně: Přidejte 20 ml $\pm$ 1 ml koncentrátu do 980 ml teplé vody (2% roztok). Nasávejte pomocí sacích trubic. Nechte působit minimálně 15 minut (pro dosažení plného účinku nechte působit 60 minut) a poté důkladně opláchněte čistou vodou. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost: Baktericidní (15 minut), včetně Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila. Kvasinkocidní (15 minut). Virus hepatitidy B (15 minut), virus hepatitidy C (15 minut), HIV (15 minut). Tuberkulocidní (60 minut). Fungicidní (30 minut).

Testováno podle standardů: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13697, EN 13624, ASTM E1052.

Složení: voda, dimethyldioctyl amonium chlorid, dipropylenglykol, 2-aminoethanol, tetrasodný ethylendiamintetraacetát, ethanol, kyselina citronová, neiontové povrchově aktivní látky, odpěňovač, barvivo.

Nebezpečí:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P260: Nevdechujte prach/dýmy/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování:

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

P235: Uchovávejte v chladu.

Kontraindikace:

Neslučitelné materiály: hliník, měď.

Likvidace:

Nevylévejte koncentrát do kanalizace nebo řek.

Jakýkoli vážný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být hlášen výrobcí a příslušným orgánům.