

POLO DENT®

Probiotický čistič sacích zařízení

KONCENTRÁT

2,5 l e

REF 83 00 40




LOT



viz obal



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
NL- 5061 JR Oisterwijk
www.polodent.com
+31 (0)13 528 80 55

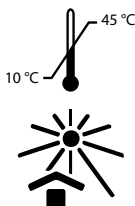

Koncentrovaná a intenzivně působící probiotická čisticí kapalina pro sací zařízení, separátory amalgámu a umyvadla v zubních ordinacích. Účinně odstraňuje veškeré znečištění a udržuje nádržku a hadičky čisté. Zabraňuje tvorbě biofilmu a snižuje riziko škodlivých bakterií. Zabraňuje tvorbě nepříjemných pachů. Má dlouhotrvající účinek.

Složení podle směrnice ES:

<5 % fosfonátů, polykarboxylátů; enzymy; Bacillus ferment; PHENOXYETHANOL.

Návod k použití:

- Používá se jako 3% roztok. Přidejte 30 ml koncentráту do 1 litru vody a odsajte.
- Frekvence používání: dvakrát denně, před prvním a po posledním použití zařízení.
- Před použitím protřepat.
- Vyprázdněte oplachovací nádržku podle aktuálně platných předpisů.
- Do sacího systému nebo plivátka se nesmí dostat žádná pěnidla.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Skladování:

Uchovávejte při teplotě mezi 10 °C a 45 °C; chraňte před přímým slunečním zářením. Nemíchejte produkt s jinými dezinfekčními prostředky.

Likvidace:

Naředěný přípravek je nutné spotřebovat do 5 dnů, zbytek lze vylít do kanalizace.

Pro tento produkt nejsou vyžadována žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

