

PLUS

SUCTION DISINFECTION CITRUS FRESH

DAILY

Dezinfekční koncentrát pro odsávací systémy, denní použití

Způsob použití

Koncentrát s nízkou pěnivostí pro každodenní čištění a dezinfekci zubních odsávacích zařízení a ústních výplachů. Určeno pro použití v (zubním) lékařství.

Pokyny k použití

Koncentrát je nutné nejprve zředit vodou. K tomu naplňte 20 ml koncentrátu vodou z vodovodu na 1000 ml a tento roztok odsát pomocí odsávací hadice (odsávačka slin). Odsávací zařízení by mělo být podle zatížení dezinfikováno jednou až dvakrát denně. Dezinfekce ústní sklenice se provádí nalitím přibližně 250 ml připraveného roztoku. Nemíchejte s čisticími prostředky ani jinými dezinfekčními prostředky! Připravené roztoky vždy připravujte čerstvé a ihned použijte! Pouze pro profesionální uživatele.

Doba působení: Doporučená koncentrace pro použití: 2 %

Bakterie a Candida albicans podle VAH s vysokým zatížením jako dezinfekce nástrojů: 2,0 % 5 min. 1,0% 60 min Bakterie podle EN 13727 a EN 14561 (vysoké zatížení): 3,0 % 2 min. Candida albicans podle EN 13624 a EN 14562 (vysoké zatížení): 3,0% 2 min. Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV): 2,0% 2 min. podle RKI/DVV (se zátěží) 2,0% 5 min. podle EN 14476, vysoká zátěž)

Bezpečnostní pokyny

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H 411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P 302+P 352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P 305+P 351+P 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P 332+P 313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P 337+P 313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P 501 Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Obsahuje N,N-dimethyl-N-dioctylamoniumchlorid, hydroxid draselný.

(ES) č. 648/2004: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfémy.

Veškeré závažné nežádoucí příhody související s prostředkem musí uživatel/pacient oznámit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel/pacient bydliště.

 **Polo MB Oisterwijk BV**
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands
Prisman GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-8
64653 Lorsch, Germany
+49 6251 8669800

Nebezpečí



CH REP



CE
0124

PRISMAN Pharma International AG Am
Stalden 16 · CH-4622 Egerkingen

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

