

PLUS

SUCTION CLEANER ALDEHYDE FREE

WEEKLY

Čistící koncentrát bez aldehydů pro odsávací systémy, týdenní použití

Způsob použití

Nepěňivý kyselý čistící koncentrát určený k čištění a údržbě dentálních odsávacích systémů. Doporučuje se používat prostředek dvakrát týdně.

Pokyny k použití

Koncentrát musí být před použitím zředěn vodou. Doporučená aplikační koncentrace: 5 %. Za tímto účelem doplňte 100 ml koncentráту vodou z vodovodu na celkový objem 2000 ml, nasajte roztok odsávací hadicí (slinnou savkou) a nechte působit po dobu nejméně 30 minut. Doplňkové čištění přes plivátko se provádí nalitím připraveného pracovního roztoku.

V závislosti na zatížení odsávacího systému se doporučuje provádět čištění jednou až dvakrát týdně čističem odsávacího systému W. Nemíchejte s jinými čistícími ani dezinfekčními prostředky. Před zahájením práce důkladně propláchněte odsávací hadice a plivátko vodou.

Pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny

H 315 Dráždí kůži.

H 319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Používejte ochranné rukavice a ochranu očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Pouze pro profesionální uživatele.

(ES) č. 648/2004: < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, < 5 % fosfonáty.

O všech závažných incidentech, ke kterým došlo v souvislosti s tímto produktem, musí uživatel/pacient informovat výrobce a příslušný orgán členského státu, v němž uživatel/pacient sídlí.

CH REP PRISMAN Pharma International AG
Am Stalden 16 · CH-4622 Egerkingen

 **Polo MB Oisterwijk BV**
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands
Prisman GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-8
64653 Lorsch, Germany
+49 6251 8669800

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Lážka 17
750 02 Písek
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



Varování

UFI: 1DGE-MCMN-E00V-AWUJ

