

PLUS

**BUR DISINFECTION
GREEN FLOWER**

KONCENTRÁT

Dezinfekční prostředek pro rotační nástroje2,5 L  REF 83 84 06

Způsob použití: Speciální přípravek k okamžitému použití pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci rotačních lékařských nástrojů, jako jsou vrtáky, frézy a diamantové leštičky. Neobsahuje alkohol. Vhodný pro (zubní) lékařské ordinace, kliniky a pedikérská studia.

Pokyny k použití: Bur Disinfection Plus používejte vždy zředěný! V případě silného znečištění zdravotnické prostředky způsobí k dezinfekci ponornou lázní nejprve mechanicky očistíte a pokud možno otevřené vložte do pracovního roztoku. Všechny povrchy a kavity, které mají být dezinfikovány, musí být zcela navlhčeny pracovním roztokem. Po použití okamžitě vložte nástroje do roztoku připraveného k použití, všechny díly, které mají být dezinfikovány, musí být zcela zakryty. Po uplynutí doby působení dezinfikovaný materiál důkladně opláchněte nejlépe demineralizovanou vodou a osušte. Nesměšujte s jinými dezinfekčními nebo čisticími prostředky, **nevhodné pro hliník**. V závislosti na stupni znečištění je nutné pracovní roztok obnovit (doporučení RKI: alespoň každý pracovní den). Pracovní roztok zředěný vodou lze likvidovat do odpadních vod. Je třeba dodržovat doporučení výrobce přístroje pro obnovu. Kritické zdravotnické prostředky musí být následně sterilizovány. Pouze pro profesionální uživatele. Doporučuje se používat ochranné rukavice a prostředky pro ochranu zraku. Velmi dobrá materiálová snášenlivost se všemi běžnými nástrojovými materiály (např. nerezová ocel, ocel, pryž, diamantem potažené vrtáky, různé plasty jako PMMA, POM, EDPM). Při použití nových materiálů je třeba předem zkontrolovat kompatibilitu. Dávkovaná množství a doby expozice by měly být přísně dodržovány a neměly by být podhodnoceny. Předávkování by se také mělo zabránit z důvodů slučitelnosti s životním prostředím a materiálem.

Doby působení: Bakterie (vč. MRSA) podle EN 13727, EN 14561, VAH, (vysoká zátěž): Konc.: 5 min. Candida albicans podle EN 13624, EN 14562, VAH, (vysoká zátěž): Konc.: 5 min. Mykobakterie (M. terrae a M. avium) podle EN 14348 a EN 14563 (nízká zátěž): Konc.: 5 min. „Omezeně virucidní“ (obalené viry jako např. HBV, HIV, HCV) podle RKI/DVV, EN 14476 (vysoká zátěž): Konc.: 5 min.

Bezpečnostní pokyny: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H 273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Nařízení (ES) 648/2004: Obsahuje <5 % neiontových povrchově aktivních látek, parfemační látky. O všech závažných nežádoucích příhodách, ke kterým došlo v souvislosti s tímto produktem, musí uživatel/pacient informovat výrobce a příslušný orgán členského státu, v němž je uživatel/pacient usazen.

CH REP PRISMAN Pharma International AG
Am Stalden 16 · CH-4622 Egerkingen

 **Polo MB Oisterwijk BV**
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands
Prisman GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-8
64653 Lorsch, Germany
+49 6251 8669800

0°C 32°F 40°C 104°F  
0124

2025-10

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

 **JANOUGH DENTAL**
NUENT GROUP