

Držák rentgenového senzoru

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento návod obsahuje pokyny k používání a výběru držáků senzorů PoloDent. Tyto pokyny jsou určeny především kvalifikovaným odborníkům v oblasti stomatologické péče.

Postup čištění a sterilizace:

Před použitím vždy zakryjte senzor novým hygienickým návlekem, než jej vložíte do držáku. Po použití u pacienta musí být držák vyčištěn a sterilizován.

1. Zlikvidujte hygienický návlek.
2. Vyměňte polohovací kroužek.
3. Odstraňte viditelné nečistoty z držáku drhnutím horkou vodou a mýdlem nebo čisticím prostředkem.
4. Opláchněte držák teplou vodou z vodovodu.
5. Sterilizujte v autoklávu podle pokynů výrobce autoklávu.

NEPŘEKRAČUJTE 134 °C, pouze parní autokláv.

NEPOUŽÍVEJTE chemický autokláv.

NEPROVÁDĚJTE sterilizaci suchým teplem.

NEPOKLÁDEJTE plastové části během sterilizace v autoklávu na kovové povrchy.

NEPOUŽÍVEJTE glutaraldehydové prostředky na bázi fenolu.


Poznámka:

Plastové části mají omezenou životnost a při opakované sterilizaci mohou vykazovat určité zabarvení. Po několika cyklech v autoklávu se držáky opotřebovávají.


Likvidujte je v souladu s místními předpisy. Lze zakoupit náhradní refilly jako náhradu za opotřebované držáky.

POLO|DENT[®]

Montáž pro všechny horizontální polohy (Bitewing a Posterior):

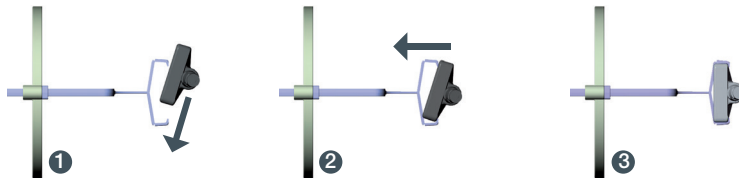

Montáž pro všechny vertikální polohy (Periapical a Endo):

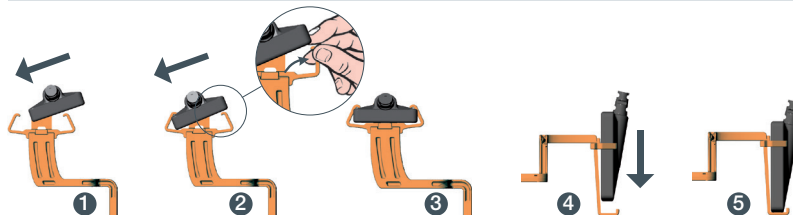


Obecné hygienické pokyny:

Výrobek je určen k opakovanému použití; před použitím u každého pacienta musí být sterilizován v autoklávu nebo termodezinfektoru. Nejprve vložte senzor do návleku na senzor a teprve poté jej umístěte do držáku senzoru.

Držák senzoru musí být po použití u každého pacienta sterilizován v autoklávu nebo termodezinfektoru.


Polohovací kroužek

Otočením držáku senzoru změňte jeho polohu a použijte druhý upevňovací bod polohovacího kroužku.

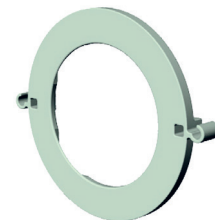


Bitewing

LEVÝ

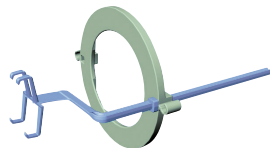


PRAVÝ

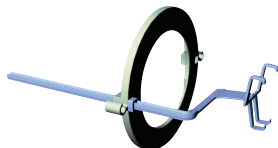


Velikost 1 REF. 87 30 10
Velikost 2 REF. 87 30 55

Periapikální

LEVÝ

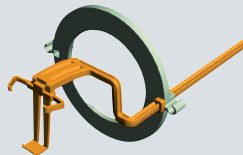

PRAVÝ

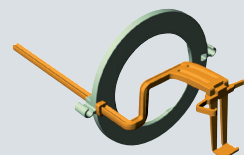


Velikost 1 REF. 87 30 15
Velikost 2 REF. 87 30 60

Posteriorní

Horní vpravo / dolní vlevo
(UR/LL)




Horní vlevo / dolní vpravo
(UL/LR)

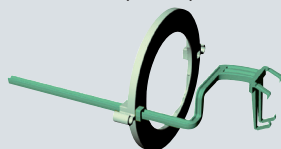

Velikost 1 REF. 87 30 20
Velikost 2 REF. 87 30 65

Endo

Horní vpravo / dolní vlevo
(UR/LL)

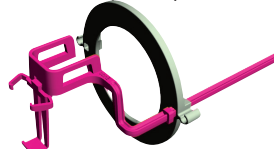

Horní vlevo / dolní vpravo
(UL/LR)



Velikost 1 REF. 87 30 25
Velikost 2 REF. 87 30 70

Velikost 1 = 2x3 cm

Velikost 2 = 3x4 cm