

Aidite Masking Liquid - Návod k použití

Použití výrobku

Funkce: Nanáší se štětcem na vnitřní povrch zirkonové náhrady za účelem zakrytí tmavého abutmentu, kovových čepů nebo implantátu.

Indikace

Diskolorované zuby, devitalizované zuby, zuby s tetracyklinovou pigmentací, kovové čepy, implantátové suprastruktury

Materiály, na které se aplikuje

Všechny zirkonové materiály

Poznámka: Doporučeno používat pouze v oblastech s tloušťkou materiálu větší než 0,8 mm.

Příprava

Nástroje: štětec velikosti 0, plastová nádoba, pec

Výrobky: Aidite indicator, masking liquid

Návod k použití

Nanášení štětcem

Spotřební materiál: Indicator

Funkce indicatoru: Způsobuje zviditelnění barvy masking liquidu a slouží k indikaci a kontrole nanášení. Indicator nemá vliv na konečný barevný efekt.

Postup:

Smíchejte masking liquid s indicatorem. (Způsob míchání: vytlačte přiměřené množství masking liquidu do plastové nádoby, poté špičkou štětce velikosti 0 naberte malé množství indicatoru, přidejte jej k masking liquidu a důkladně promíchejte do homogenní směsi.)

Pomocí štětce velikosti 0 naberte směs masking liquidu a jedním tahem ji naneste na vnitřní stranu korunky.



UPOZORNĚNÍ!

Poznámky:

- Nepoužívejte nadměrné množství liquidu. Naberte liquid pouze špičkou štětce a před nanesením lehce setřete přebytek o hrdlo lahvičky.
- Nenanášeje příliš silnou vrstvu, zejména v oblasti okrajů nebo v tenkých místech, aby se zabránilo nadměrnému pronikání masking liquidu, které by mohlo vést ke vzniku nežádoucí neprůsvitné (opakní) vrstvy na povrchu.
- Výrobek musí být spotřebován do 90 dnů od otevření. Liquid nesmí být dlouhodobě vystaven působení vzduchu. Po každém použití musí být lahvička pečlivě a těsně uzavřena.

Poznámka k použití na bílý zirkon:

Při práci s bílým zirkonem nejprve ponořte korunku podle standardního postupu barvení (dipping). Následně proveďte sušení v peci při teplotě 150 °C po dobu 20 minut.

Po vysušení pokračujte nanášením masking liquidu podle výše uvedeného postupu.