

## CSF-200 L Změna způsobu připojení a tipy k instalaci

### 1.1. Aktualizace sintrovacích tyčí



První/druhá generace  
(2 zapojení sériově  
a 2 paralelně)



Třetí generace  
(2 sériově a 2 paralelně)




Čtvrtá generace  
(4 sériově)

### Změna 1: Horní izolační blok




První/druhá generace

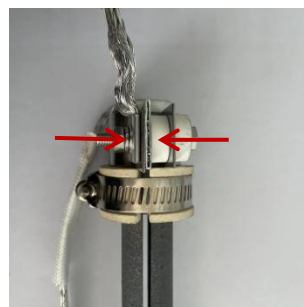

Třetí/čtvrtá generace

(Třetí a čtvrtá generace mají přidáné bílé izolační bloky, které zvětšují vzdálenost mezi kovovým plátem a hlavním tělem sintrovacích tyčí, aby se zabránilo jejich poškození způsobenému zkratem.)

### Změna 2: Instalace izolační pásky na kovový vodič sintrovacích tyčí čtvrté generace

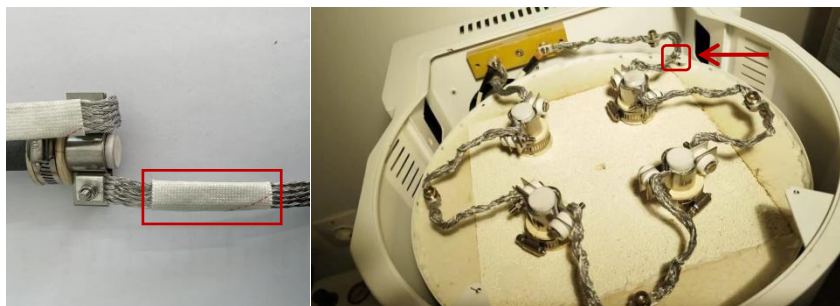

(Zabránění náhodnému kontaktu mezi vodičem a kovovým pláštěm pece, který by mohl způsobit zkrat.)

**Změna 3: Tělo sintrovacích tyčí čtvrté generace je označeno, aby bylo možné je odlišit od sintrovacích tyčí třetí generace.**



1. Je vyznačeno datum změny sintrovacích tyčí.



2. Je vyznačena změna napětí sintrovacích tyčí.

## 2. Změna způsobu zapojení

2.1 První generace / druhá generace / třetí generace jsou všechny zapojeny 2 sériově a 2 paralelně. Schéma zapojení je následující:

1./2. generace



3. generace



### 2.2 Změny ve způsobu zapojení sintrovacích tyčí čtvrté generace

U nové pece počínaje sériovým číslem: **2303L435**

(To znamená: po tomto sériovém čísle je pec po opuštění továrny ve změněném stavu a používá 4 sériová připojení.)

V balení nové pece je přiložen obrázek zapojení, viz dále:

### **Schéma zapojení Si-C topných tyčí pece CSF-200L**

Zapojte podle obrázku. Šroub musí být pevně dotažen a nesmí docházet k žádnému nedokonalému (volnému) kontaktu.



2. Pro starší pec: Po obdržení sintrovacích tyčí čtvrté generace je nutné ihned změnit zapojení na sériové. Způsob rozlišení sintrovacích tyčí je uveden výše.

Janouch Dental s.r.o.  
Malá Dlážka 17  
750 02 Přerov  
info@janouch-dental.cz  
+420 604 251 198

