

Firing Paste

Návod k použití

Dokument č.: ADT-QT-SC-IN-003/01-02



Název produktu: Firing Paste

Specifikace produktu: 5 ml, 8 ml, 10 ml, 12 ml.

Oblast použití: Vhodné pro rekonstrukce, které nelze během procesu glazování umístit přímo na vypalovací misku nebo vypalovací trn, jako je fazeta, inlay, onlay, částečná korunka, jednoduchá korunka a tělo můstku atd.

Hlavní složky: Výrobek se skládá z oxidu hlinitého, křemene, hydroxyethylcelulózy, polyetylglykolu a destilované vody.

Předpokládané použití: Tento produkt se používá k udržení nebo ochraně keramických rekonstrukcí, které jsou umístěny na vypalovacím nosiči během procesu vypalování nebo glazování.

Způsob použití:

1. Korunkový můstek: Odšroubujte víčko, jemně zatlačte na píst a vytlačte množství o velikosti hrášku na spodní nebo vnitřní stranu rekonstrukce; tu poté umístěte na vypalovací nosič.
2. Fazeta, inlay, high inlay: Odšroubujte víčko, jemně zatlačte na píst a vytlačte množství o velikosti hrášku na spodní stranu rekonstrukce; tu poté umístěte na vypalovací nosič.

Upozornění:

1. Po použití nezapomeňte na stříkačku nasadit víčko a pevně ho utáhnout. Uchovávejte stříkačku uzavřenou a chráněnou před světlem při pokojové teplotě.
2. Množství pasty by při každém použití nemělo být příliš velké, stačí velikost hrášku.
3. Vypálená pasta vypadá jako bílá hmota, která může být mírně přilepená k rekonstrukci; v takovém případě omyjte pomocí čistícího detergentu.
4. Množství použité pasty by mělo být přiměřené, aby se zabránilo kontaktu vypalovací pasty s barvicí pastou na okraji rekonstrukce.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

1. Vzhled: hladký povrch, hladký vnější obal, bez škrábanců, bez úniku, bez zbytků obsahu, bez nečistot.
2. Barva: bílá nebo mléčně bílá.
3. Forma: pasta

Nežádoucí účinky: Tento produkt nemá žádné nežádoucí účinky.

Doba použitelnosti: 3 roky

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Během skladování a přepravy zabraňte silnému stlačení, vibracím a kolizi s tvrdými předměty.

Balení: v kartonu nebo plastové krabici.

Výkonné normy: Technické požadavky na výrobek

Datum výroby: viz obal výrobku

Výrobce: Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.

Poprodejní servisní strana: Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.

Adresa společnosti: No. 9 Dushan Road, Economic and Technological Development Zone, Qinhuangdao City, Hebei Province.

PSČ: 066004

Tel.: 4000031233 / 0335-8587898

Fax: +863358587198

Web: www.aidite.com

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na výrobce.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.

Malá Dlážka 17

750 02 Přerov

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198

