

ASEPTONET WIPES

Ubrousky impregnované čistícím a dezinfekčním roztokem.

Biocidní přípravek PT2 (dezinfekční přípravek na povrchy, materiály, vybavení a nábytek, které nejsou určeny pro přímý styk s potravinami nebo krmivými).

Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na etiketě a informace o přípravku.

Pouze pro profesionální použití.

OBLAST POUŽITÍ:

Přípravek je určen k rychlému čištění a dezinfekci:

- neporézních tvrdých povrchů ve zdravotnictví a v komunálním prostředí (kliky dveří, pracovní desky, nábytek, sanitární zařízení apod.);
- neporézních tvrdých povrchů nekritických zdravotnických prostředků v rámci kontroly mikrobiologických rizik souvisejících s prostředím (zdravotnická lůžka, monitorovací přístroje, konektory a kabely apod.).

SLOŽENÍ:

Účinná látka: didecyldimethylamonium-chlorid CAS č.: 7173-51-5 Obsah: 0,29 % (m/m)

KOMPATIBILITA MATERIÁLŮ:

Polymery:	Kovy:
Polypropylen	Hliník
PVC	Nerezová ocel 316
PSU	Nerezová ocel 304
PPSU	
Polykarbonát	Silikon:
PMMA	Dow Corning
Polyuretan (TPU)	
Polyamid (PA-6)	
Polyethylen (HDPE)	
PC-ABS	

● Vyhovující
 ● Rizikové
 ● Nevyhovující



ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINNOST (5 minut, 20 °C)

Baktericidní účinnost:

EN 16615*, EN 13727*, EN 13697*, EN 1276**

Kvasinkocidní účinnost:

EN 16615*, EN 13624*, EN 13697*, EN 1650**

Omezené virucidní spektrum účinnosti:

EN 14476*, EN 16777*: adenovirus – norovirus – virus vakcinie
 EN 14476*: herpesvirus – PRV – BVDV – koronavirus – HIV – rotavirus

* 3 g/l hovězího albuminu + 3 ml/l ovčích erytrocytů ** 3 g/l hovězího albuminu

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem. Skladujte při teplotě do 40 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměr ubrousku:	18 x 20 cm
Počet ubrousků v balení:	100
Počet balení v kartonu:	12
Počet balení na paletě:	600
Katalogové číslo:	ASEPNI10058

NÁVOD K POUŽITÍ:

Ubrousky připravené k okamžitému použití, na jedno použití (kód formulace: WI). Použijte 3 ubrousky na 1 m² ošetřovaného povrchu; zajistěte jeho úplné navlhčení. Nechte působit 5 minut. Neoplachujte. Aplikaci v případě potřeby opakujte. Po každém použití obal pečlivě uzavřete, aby nedošlo k vysychání ubrousků. Doporučuje se předem vyzkoušet přípravek na malé, méně viditelné ploše. Přípravek není kompatibilní s materiály typu PC-ABS.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Po použití si důkladně umyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal na příslušném sběrném místě odpadu v souladu s platnými místními předpisy. V případě nehody nebo podezření na intoxikaci kontaktujte Toxikologické informační středisko. Tento přípravek používejte v souladu s údaji uvedenými na etiketě. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

