

Firefly Bezdrátové světlo

Návod



Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátové osvětlení lupových brýlí Xpedent, které se vyznačuje nízkou hmotností a přenosností.

Používání bezdrátového osvětlení zajišťuje mobilitu a umožňuje neomezený pohyb.

Hlavní výhody:

- **Bezdrátové**

Poskytuje volnost pohybu, zvyšuje pohodlí a efektivitu.

- **Lehké**

Lehká konstrukce s posunutým těžištěm, ergonomicky navržená pro lepší uživatelský komfort.

- **Snadné ovládání**

Dotykový spínač umožňuje zapnout nebo vypnout osvětlení pouhým dotykem.

- **Rychlá výměna baterie**

Baterie se ke světlu připojuje pomocí magnetického konektoru.

- **Systém proti chybnému zapojení**

Magnetický konektor zabraňuje nesprávnému připojení polarity mezi baterií a světlem nebo nabíjecí základnou a zajišťuje úspěšné připojení pouze tehdy, když se magnety přitahují.

- **Kompatibilita**

Lze instalovat na většinu modelů lup.

Příslušenství

1. Hlavní jednotka
2. Baterie
3. Nabíjecí základna
4. Oranžový filtr
5. Adaptér
6. USB kabel
7. Klíč 1.5#



(Obrázek 1)

Pokyny k použití:

1. Oranžový filtr je instalován v přední části bezdrátového světla pomocí vlastní konstrukční součásti, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka: K zajištění oranžového filtru použijte klíč 1.5#.



(Obrázek 2)

2. Připojte bezdrátové světlo k rámu brýlí pomocí adaptéru, jak je znázorněno na obrázku.



(Obrázek 3)

3. Umístěte baterii na magnetický konektor. Magnetický konektor zarovná baterii s bezdrátovým světlem.



(Obrázek 4)

4. Jakmile je baterie vyrovnaná, je světlo připraveno k použití.



(Obrázek 5)

5. Nastavte sklon světla tak, aby světelný paprsek směřoval do pracovního zorného pole.



(Obrázek 6)

Bezdrátové světlo


Světlo lze nastavit nahoru a dolů. (Obrázek 7)

Baterie se k bezdrátovému světlu připojuje pomocí magnetických konektorů. (Obrázek 8)

Pomocí adaptéru lze bezdrátové světlo připevnit na rám brýlí.



(Obrázek 7)

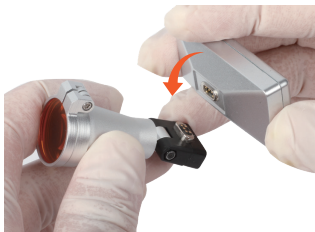

(Obrázek 8)

Baterie

Každé bezdrátové světlo obsahuje tři baterie a jednu nabíjecí základnu.

Baterie řídí napájení světelného zdroje. Tato funkce se ovládá dotykem v horní části bateriového bloku.

K dispozici jsou tři různé intenzity světla.



(Obrázek 9)
dotyková plocha



(Obrázek 10)

- Dotkněte se jednou pro nastavení nejvyššího jasu.
- Dotkněte se dvakrát pro nastavení středního jasu.
- Dotkněte se třikrát pro nastavení nejnižšího jasu.
- Dotkněte se čtyřikrát pro vypnutí napájení.

Poznámka:

Baterie podporuje konstantní úroveň intenzity světla po celou dobu provozu.

Jakmile se baterie zcela vybije, světlo se zhasne.

Nabíjení baterie

Pomocí kabelu USB-C připojte jeden konec k nabíjecí základně a druhý konec k adaptéru AC/DC. Adaptér zapojte do zásuvky. Umístěte bateriové bloky na nabíjecí základnu; může nabíjet dva bateriové bloky současně.



(Obrázek 11)



Pokud kontrolka svítí
červeně, znamená to,
že se baterie nabíjí.

(Obrázek 12a)



Pokud kontrolka svítí
zeleně, znamená to, že
je baterie plně nabitá.

(Obrázek 12b)

Průměrná doba nabíjení prázdné baterie je 1,5 hodiny.

Po úplném nabití je třeba baterii vyjmout z nabíjecí základny a řádně ji uschovat.

Bezpečnostní opatření

1. K nabíjení baterií Firefly nepoužívejte nabíječky jiných výrobců, i když vypadají stejně. Nabíječky třetích stran mohou být nekompatibilní s požadavky na napájení bateriového bloku a mohly by způsobit jeho poškození.
2. Zabraňte přehřátí baterie tím, že se vyhnete přímému slunečnímu záření nebo přímému kontaktu s vyhřívanými povrchy.
3. Chraňte bateriový blok před nárazy a poškozením ostrými předměty.
4. Baterie nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je alkohol, metanol, aceton apod.
5. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré závažné incidenty je třeba nahlásit místnímu prodejci, který bude neprodleně informovat výrobce.

Odstraňování závad

Typ problému	Řešení
LED světelný zdroj bliká nebo pohasíná	Vyměňte baterii, nabijte baterii
Baterie nefunguje	Kontaktujte místního prodejce
Porucha LED světla	Kontaktujte místního prodejce
Baterie se při nabíjení přehřívá	Kontaktujte místního prodejce
Únik baterie	Kontaktujte místního prodejce
Zvětšení baterie	Kontaktujte místního prodejce
Dotykové ovládání bateriového bloku nereaguje	Vyměňte bateriový blok; pokud problém přetrvává, kontaktujte místního prodejce

Technické specifikace

AC/DC adaptér

Vstupní napětí	100–240 V AC
Výstupní napětí	5 V DC

Světelný zdroj

Intenzita osvětlení	35 000 LX / 55 000 LX
Teplota barev	4 500–6 000 K
Šířka	50 mm
Průměr	19 mm
Hmotnost	9 g
Životnost LED lampy	50 000 hodin
Průměr bodu (ve vzdálenosti 350 mm)	70 mm
Hmotnost externího filtru	2 g

Nabíjecí základna

Délka	62 mm
Šířka	58 mm
Výška	12 mm
Nabíjecí rozhraní	USB-C

Záruční karta

Jméno zákazníka		 (I) Pro distributora
Adresa		
PSČ		
Telefon		
Model		
ID zařízení		
Datum nákupu		
Kontaktní osoba		
Datum	Záznamy údržby	Opravář



Guilin Yikeshi Medical Instrument Co., Ltd.
 D-8, Guilin National High-tech Zone Information
 Industrial Park, Chaoyang Road, Qixing District,
 Guilin, Guangxi, 541004, P.R.China
 Postal Code: 541004
 Tel: 0086 0773 5805522
 Fax: 0086 0773 5805522
 Email: sales@xpediency.cn
 Website: www.xpedent-intl.com

Distributor:

Razítko

Záruční karta

Jméno zákazníka		 (II) Zpět výrobci
Adresa		
PSČ		
Telefon		
Model		
ID zařízení		
Datum nákupu		
Kontaktní osoba		
Datum	Záznamy údržby	Opravář



Guilin Yikeshi Medical Instrument Co., Ltd.
 D-8, Guilin National High-tech Zone Information
 Industrial Park, Chaoyang Road, Qixing District,
 Guilin, Guangxi, 541004, P.R.China
 Postal Code: 541004
 Tel: 0086 0773 5805522
 Fax: 0086 0773 5805522
 Email: sales@xpediency.cn
 Website: www.xpedent-intl.com

Distributor:

Razítko

Pokyny k záruce

I Platnost záruční doby

Podmínky služby: Nabízíme 12 měsíců záruční opravy zařízení na základě data prodeje uvedeného na záručním listu a zpoplatněnou údržbu po celou dobu životnosti produktu.

II Rozsah záruky

Během platné záruční doby jsme odpovědní za jakékoli potíže způsobené kvalitativními problémy nebo technikou a konstrukcí produktu.

III Následující případy nejsou kryty zárukou

1. Poškození způsobené nedodržením návodu k obsluze nebo nedostatkem potřebných podmínek.
2. Poškození způsobené nevhodným provozem nebo rozebráním bez povolení.
3. Poškození produktu způsobené neočekávaným pádem nebo nárazem ze strany uživatele.
4. Poškození způsobené nevhodnou přepravou nebo skladováním.
5. Chybějící razítko prodejce nebo neúplně vyplněný záruční list.

Pokyny k záruce

I Platnost záruční doby

Podmínky služby: Nabízíme 12 měsíců záruční opravy zařízení na základě data prodeje uvedeného na záručním listu a zpoplatněnou údržbu po celou dobu životnosti produktu.

II Rozsah záruky

Během platné záruční doby jsme odpovědní za jakékoli potíže způsobené kvalitativními problémy nebo technikou a konstrukcí produktu.

III Následující případy nejsou kryty zárukou

1. Poškození způsobené nedodržením návodu k obsluze nebo nedostatkem potřebných podmínek.
2. Poškození způsobené nevhodným provozem nebo rozebráním bez povolení.
3. Poškození produktu způsobené neočekávaným pádem nebo nárazem ze strany uživatele.
4. Poškození způsobené nevhodnou přepravou nebo skladováním.
5. Chybějící razítko prodejce nebo neúplně vyplněný záruční list.

Dovozce a distributor

Janouch Dental s.r.o.

Malá Dlážka 17

750 02 Přerov

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198



Xpedent Austria GmbH

Millennium Park 9 6890 Lustenau Austria



Guilin Yikeshi Medical Instrument Co.,Ltd.

D-8,Guilin National High-tech Zone Information Industrial Park,
Chaoyang Road,Qixing District,Guilin,Guangxi,541004,P.R.China

Postal Code: 541004 Tel: 0086 0773 5805522

Fax: 0086 0773 5805522 Email: sales@xpediency.cn

Website: www.xpedent-intl.com

Poslední revize návodu:

20241202 V1.1