

BIO C-Repair

Návod k použití

POUŽITÍ

Biokeramický reparační cement připravený k použití.

INDIKACE

- A. Léčba perforace kořene nebo furkace kanálku;
- B. Léčba perforace kořene nebo chirurgickou furkací;
- C. Léčba vnitřní resorpce kanálku;
- D. Chirurgická léčba vnější nebo komunikující vnitřní resorpce;
- E. Apexifikace;
- F. Apicigeneze a pulpotomie.
- G. Regenerace pulpy

SLOŽENÍ

Křemičitan vápenatý, hlinitan vápenatý, oxid vápenatý, oxid zirkoničitý, železo-oxid, oxid křemičitý a dispergační činidlo.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Bioaktivní produkt připravený k použití;
- Pracovní doba: produkt připravený k použití
- Čas tuhnutí: ≤ 120 minut, v závislosti na vlhkosti;
- 🔔 *Důležité: vysušte kavitu*
- Vysoká alkalita - pH: ~ 12;
- Vysoká radiopacita: ≥ 7 mm
- Tuba se závitem pro usnadnění aplikace

Postup použití

A. OŠETŘENÍ KANÁLKU NEBO FURKACE DO KANÁLKU

1. Anestetizujte, izolujte od vlhkosti, proveďte endodontické ošetření kanálku a vyčistěte stávající perforace;
 2. Naplňte kanálek konvenčním způsobem a nechte perforaci odkrytou;
 3. Proveďte hemostatickou kontrolu a udržujte dutinu mírně vlhkou;
 4. Vložte BIO-C® REPAIR a pokud dojde k přetečení, odstraňte přebytečný materiál;
 5. RTG zkontrolujte aplikaci
 6. Zaplňte kanálek guttaperčou a výplňovým cementem jako je MTA-FILLAPEX nebo BIO-C® SEALER;
- 🔔 *Důležité:*
- V perforacích furkace naneste vrstvu skleněného ionomeru jako mechanickou bariéru pro překrytí finálním materiálem
 - Nepoužívejte kompozitní pryskyřici přímo na BIO-C REPAIR před jejím konečným tuhnutím.
 - Rentgenujte a sledujte po dobu nejméně dvou let.

B. OŠETŘENÍ PROVÁDĚNÍ KOŘENU NEBO FURKACE CHIRURGICKY

1. Anestetizujte, odkryjte gingivální lalok a proveďte osteotomii k nalezení perforace;
2. Připravte perforaci vhodným nástrojem, který usnadní vložení materiálu;
3. Proveďte hemostatickou kontrolu a udržujte dutinu mírně vlhkou;
4. Vložte BIO-C® REPAIR do dutiny, upravte kondenzátory a odstraňte přebytečné množství

pokud přetéká;

5. Znovu překryjte gingivou a zašijte ji;

6. Rentgenujte a sledujte po dobu nejméně dvou let.;

VAROVÁNÍ

- Izolujte kořenový kanálek;
- Po použití tubu okamžitě uzavřete , aby se zabránilo vytvrzení produktu;
- Dutiny, kam bude produkt vložen, nemusí být úplně suché, ale nesmí být příliš vlhké
- Nepoužívejte produkt k plnění kanálků, v případě těchto indikací:
- Produkt používejte až po ošetření infekce
- Nepoužívejte výrobek, pokud komunikuje s gingivou, protože dojde k rozpadu materiálu;
- Zabraňte nadměrnému přetečení produktu do periapikální oblasti;
- K manipulaci a aplikaci produktu používejte sterilní nástroje;
- Produkt na jedno použití;
- Vyčistěte a dezinfikujte tubu při následném použití, abyste zabránili křížové kontaminaci.

OPATŘENÍ

- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle, masku a rukavice. Pokud existuje kontakt s očima nebo pokožkou, omyjte vodou;
- Nepoužívejte produkt po uplynutí doby expirace;
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený obal;
- Nepoužívejte u pacientů, u nichž je hlášena citlivost na složky přípravku
- Produkt nebyl testován u těhotných a kojících žen;
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt na špičce injekční stříkačky není ztvrdlý, a pokud ano, odstraňte tuto část první část.

SKLADOVÁNÍ

- Výrobek udržujte na suchém místě v teplotě mezi 15 ° C a 30 ° C s relativní vlhkostí vzduchu pod 60%;
- Výrobek nikdy neuchovávejte v chladničce, protože je citlivý na vlhkost;
- * Produkt výhradně pro použití zubního lékaře.

Výrobce:

Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.

NPJ

00.257.992/0001-37 I.E. 60128439-15. Rua Waldir Landgraf, 101 Bairro Lindóia - CEP

86031-218 - Londrina - PR Brasil. **CUSTOMER**

Distributor ČR:

Janouch Dental s.r.o.

Hradištská 161

Český Těšín 735 62