

BIO-C® TEMP

ČESKY

POPIS

Biokeramická RTG kontrastní pasta na dočasně výplně kořenových kanálků.

ÚČEL POUŽITÍ

Dospělí nebo dětská pacientí, kteří potřebují dočasnou výplň při endodontickém ošetření stálých zubů.

INDIKACE

- Dočasná výplň při endodontickém ošetření zubů s nektrózou dřeně a přeléčení;
- Dočasná výplň u zubů s perforací, vnější a vnitřní resorpcí, před použitím MTA ANGELUS nebo MTA REPAIR HP;
- Při léčbě neúplné tvorby kořenů (rhizogeneze).

SLOŽENÍ

Křemičitan vápenatý, Alumináty vápníku, Oxid vápenatý, Wolframan vápenatý, Oxid titaničitý a dispergační činidlo.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Biokompatibilní produkt připravený k použití;
- Vysoká zásaditost - pH: 12±1;
- Vysoká radioopacita: ≥ 9 mm v hliníkovém klínu podle normy ISO 6876.

POUŽITÍ

A. POUŽITÍ APLIKAČNÍCH ŠPIČEK

- Před použitím sterilizujte aplikační špičky;
- Umístěte aplikační špičku na stříkačku;
- Abyste se vyhnuli křížové kontaminaci, doporučujeme použít jednorázový plastový kryt na stříkačku;
- Před přímou aplikací do kanálku vytlačte malé množství materiálu ze stříkačky;
- Umístěte aplikační špičku správně do kanálku a zatlačte na píst malou silou, abyste zabránili vytlačení nadměrného množství produktu;
- Před uzavřením stříkačky zatáhněte píst, abyste zastavili vytékání produktu;
- Očistěte přebytečný materiál na hrotu stříkačky a dobře uzavřete, aby dovnitř nepronikla vlhkost, která by způsobila vysychání produktu;
- Při dalších použitích stříkačku vyčistěte a dezinfikujte, abyste zabránili křížové kontaminaci.

B. APLIKACE DO KANÁLKŮ

- Anestetizujte, umístěte kofferdamovou izolaci a poté proveďte biomechanickou preparaci kanálku a v případě vnitřní reabsorpce použijte specifické nástroje k odstranění zánětlivé tkáně;
- Vysušte kanálek pomocí savých papírových čepů;
- Zikvidujte materiál začátku injekční stříkačky, protože může být trochu tvrdý.
- Připojte aplikační špičku ke stříkačce;
- Vložte aplikační špičku do blízkosti zubního apexu;
- Aplikujte BIO-C® TEMP postupným zatahováním stříkačky, abyste dosáhli úplného naplnění kanálků;
- Odstraňte veškerou přebytečnou pastu z dřevěné komory;
Poznámka: V případě potřeby proveďte změny, dokud se příznaky a symptomy nenormalizují.
- Odstažení by mělo být provedeno pomocí chlomanu sodného spojeného s použitím pilníku typu Kerr, který provádí brusné pohyby proti stěnám kořenového kanálku;
- Poté propláchněte 17% roztokem EDTA a je-li to možné, aktivujte EDTA ultrazvukovou špičkou ve 3 cyklech po 10 sekundách;
- Utěsněte kanálek sealerem, jako je BIO-C® SEALER nebo MTA-FILLAPEX a gutaperčovými čepý;
- Utěsněte koronární otvor.

OPATŘENÍ

- Výrobek je citlivý na vlhkost, proto obal řádně uzavřete, aby nedošlo k vyschnutí;
- Neuchovávejte produkt v chladničce;
- Aplikační špičky nepoužívejte opakovaně;
- Při dalších použitích stříkačku vyčistěte a sterilizujte, abyste zabránili křížové kontaminaci.
- Při manipulaci s produktem používejte ochranné brýle, obličejový štít a rukavice. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou omyjte vodou.
- Nepoužívejte výrobek po uplynutí data spotřeby.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jeho obal poškozen.
- Nepoužívejte jej u pacientů, kteří hlásí citlivost na složky přípravku.
- Produkt není testován u těhotných a kojících žen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Přípravek by měl zůstat v kořenovém kanálku pacienta pouze dočasně (ne déle než 30 dní).

* Produkt určený výhradně pro zubního lékaře.

Jakékoli vážné incidenty, které se vyskytnou v souvislosti s tímto prostředkem, musí být sděleny výrobcí a příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient žije.

SKLADOVÁNÍ

- Výrobek uchovávejte na suchém a větraném místě při teplotě 15 až 30 °C a relativní vlhkosti nižší než 60 %.
- Neuchovávejte jej v chladničce.
- Po použití výrobek uzavřete SILNÝM TLAKEM pomocí originálního uzávěru.
- Vraťte stříkačku do obálky obsahující silikagel a PEVNĚ UZAVŘETE kovový obal.
- V případě biokeramických výrobků, jako je BIO-C TEMP, po použití vyjměte aplikační špičku a uzavřete stříkačku originálním uzávěrem.

10502833 - 0708122021

ANVISA: 10349450094 RX ONLY



Symboly

	Prostudujte si průvodní dokumenty.
	Minimální a maximální teplotní limit.
	Příslušensví zařízení pouze na jedno použití.
	Chraňte před sluncem.
	Nesterilní.
	Udržujte v suchu.
	Lékařské přístroje.

Technical contact | Responsable técnico | Responsável técnico: Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536. **EMERGO EUROPE** Prinsessegracht 20 - 2514 AP, The Hague - The Netherlands. **Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.** CNPJ 00.257.992/0001-37 - I.E. 60128439-15. Rua Waldir Landgraf, 101 - Bairro Lindóia - CEP 86031-218 - Londrina - PR - Brasil. **CUSTOMER SERVICE | ATENÇÃO AL CONSUMIDOR | ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:** +55 (43) 2101-3200 | ☎ +55 (43) 99919-0244 | 0800 727 3201 (Brasil) | sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br.

MADE IN BRAZIL

POZOR: Tento výrobek musí být používán v souladu s pokyny popsány v tomto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za poruchu nebo poškození způsobené nesprávným zacházením nebo použitím.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
e-mail: info@janouch-dental.cz



Přeloženo 24.5.2022