

**Popis**

Calciplus RL je krémová, rentgenkontrastní pasta s obsahem hydroxidu vápenatého a jodoformu, která se používá jako výplň kořenových kanálků.

Složení

Hydroxid vápenatý, jodoform, síran barnatý, polyethylenglykol

Indikace

- Vhodné pro všechny druhy kanálků
- Provizorní dezinfekční výplň aplikovaná během endodontického ošetření
- Léčba hlubokých kazových lézí
- Přímé překrytí dřeně
- Krycí pasta pro nepřímé překrytí
- Dočasný výplňový materiál pro zmírnění bolesti

Kontraindikace

- Použití u pacientů se známou alergií na některou z uvedených složek
- Přímé a nepřímé překrytí dřeně, pokud je poškození dřeně nevratné

Aplikace

- Vyčistěte a dobře vysušte kořenový kanálek.
- Nasaďte aplikační špičku na stříkačku a zcela naplňte kanálek zatlačením na píst stříkačky.
- Aplikační špičky jsou pouze na jedno použití!
- Po použití sejměte aplikační špičku a znovu nasaďte uzávěr na stříkačku.

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Stříkačku mějte vždy uzavřenou, když ji nepoužíváte.

Trvanlivost

2 roky od data výroby

Vedlejší účinky

Nejsou známy žádné vedlejší účinky

Likvidace

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. Uložte na schválenou skládku nebo do spalovny odpadu za podmínek schválených místním úřadem.

Nevyčištěné obaly

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

Upozornění

- Uchovávejte mimo dosah dětí!
- Pouze pro použití ve stomatologii!
- Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
- Má dráždivé vlastnosti hydroxidu vápenatého, kontakt s kůží, očima a sliznicemi může způsobit lokální podráždění. Pokud dojde k neúmyslnému kontaktu, opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů nebo stanovené oblasti použití. Uživatel je odpovědný za testování materiálu z hlediska jeho vhodnosti pro jakýkoli účel, který není výslovně uveden v návodu.
- Popisy a údaje nepředstavují žádnou záruku vlastností produktu.
- Nepoužívejte po datu expirace!
- Po použití stříkačku dobře uzavřete!
- Aplikační špičky jsou pouze na jedno použití!

Balení

- stříkačka 2g
- aplikační špičky

Poslední revize návodu:

Rev 01 03.07.2020 TD-03-IFU-41 Ref No:2104

Přeloženo: 30.10.2023

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

