



NÁVOD K POUŽITÍ

Cavitimi™ Dočasný výplňový materiál

Popis:

Jedná se o dočasný výplňový materiál připravený k použití pro krátkodobé dočasné vyplnění kavit, nebo po endodontickém ošetření. Cavitimi™ je materiál obsahující oxid zinečnatý, uvolňující fluor a vápenaté ionty. Cavitimi™ je biokompatibilní materiál a nepoškozuje pulpu a dásně.

Výhody:

- Zabraňuje bakteriální infekci.
- Cavitimi™ je hygroskopický, snadno pohlcuje vlhkost - ve vlhkém prostředí tuhne rychle a bez vzduchových bublin.
- Vykazuje nízkou objemovou expanzi.
- Díky svému speciálně vyvinutému složení vykazuje Cavitimi™ vysokou nepropustnost a zcela vyplňuje kavitu. Poskytuje úplné uzavření proti průchodu bakterií, mikroorganismů, tekutin a organických materiálů z dutiny do systému kořenového kanálku,
- Zabraňuje úniku léčiv aplikovaných do kořenového kanálku nebo ven z kanálku.
- Cavitimi™ má vysoký koeficient lineární roztlačnosti a má vysokou mezní uzavírací schopnost.
- Díky své speciální struktuře poskytuje provozní pohodlí, nelepí se na nástroj a snadno se vkládá a vyjímá z dutiny.
- Díky vyvinutému speciálnímu složení chrání zub uvolňováním vápníku a fluoru během ošetření po dobu, po kterou v zubu zůstává.
- Je vysoce odolný vůči okluznímu tlaku a nevykazuje opotřebení. Nebylo pozorováno žádné zhoršení v ústních tekutinách nebo působením antiseptických materiálů.

Složení:

Oxid zinečnatý, síran vápenatý, fluorid vápenatý, aroma

Možnosti použití:

- Dočasné výplně kavit
- Endodontické dočasné výplně

POZOR: Cavitimi™ není vhodné, aby provizorní výplň zůstávala v dutině déle než 2 týdny.

Kontraindikace:

Nepoužívat u pacientů, kteří jsou alergičtí na některou ze složek přípravku Cavitimi™. Nepoužívat pro dlouhodobé uzávěry kavity (déle než 14 dnů).

Cavitimi™ aplikace:

Před aplikací mírně zvlhčete kavitu, nesmí být suchá, protože Cavitimi™ tvrdne po kontaktu s vlhkostí (např. sliny). Pokud zpracováváte materiál vlhkou rukavicí, může se urychlit tvrdnutí Cavitimi™.

Odeberte z nádoby požadované množství Cavitimi™ pomocí špachtle a aplikujte jej do kavit. Výplň vymodelujte odpovídajícím nástrojem a uzpůsobte ji skusovým poměrem pacienta. Opětovné zvlhčení výplně zkrátí dobu tvrdnutí Cavitimi™, ale není nezbytné.

Skladování:

Skladovací teplota 1–30°C

Chránit před slunečním zářením a vlhkostí!

Skladovatelnost nepoužitého balení: 2 roky od výroby.

Vedlejší účinky:

Protože Cavitimi™ tvrdne absorbováním slin nebo vody, může způsobit krátkodobou dočasnou bolest během tuhnutí, proto se doporučuje dutinu před aplikací dočasné výplně navlhčit. Po aplikaci lze ústa často zvlhčovat a zmírnit tím bolesti způsobené tuhnutím provizorní výplně.

Interakce:

Nejsou známy žádné interakce s jinými látkami.

Způsob likvidace:

Jeho likvidace se provádí v souladu s předpisy úředních orgánů. Předává se schválené společnosti pro „svoz nebezpečného odpadu“ za podmínek schválených místním úřadem.

Použití balení: Jeho likvidace se provádí v souladu s předpisy úředních orgánů.

Varování

Pouze pro použití zubními lékaři a pouze v určených indikacích.

V případě kontaktu Cavitimi™ s očima, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu Cavitimi™ se sliznicí stačí kontaktní oblast omýt vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.

Po každém použití pevně uzavřete uzávěr lahvičky, zabraňte vniknutí vzduchu a vlhkosti do materiálu v lahvičce.

Přebytek nepoužitého materiálu nikdy nevracejte zpět do nádoby.

Balení: lahvička 40 g

Dovozce a distributor:
Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
e-mail: info@janouch-dental.cz

