

Popis produktu

Sada produktů pro intraorální opravy vadných keramických a kompozitních fixních náhrad.

Obsahuje

- Nova Compo B Plus
- Royalry Acid Gel
- Panora 200 Acid Gel
- Ceramica Silane Activator
- Nova Compo C
- Elixo Opaque
- Aplikační štětečky
- Příslušenství

Indikace

1. Intraorální opravy nepřímých náhrad na bázi kovu
2. Intraorální opravy nepřímých náhrad ze sklokeramiky, silikátové keramiky a hybridní keramiky
3. Intraorální opravy nepřímých náhrad ze zirkonu a hliníkové keramiky
4. Intraorální opravy kompozitních náhrad

Kontraindikace

Pokud nelze vytvořit suchou pracovní plochu nebo nelze použít doporučenou techniku, není použití vhodné.

U některých osob alergických na obsah výrobku se může vzácně vyskytnout alergická reakce. Pokud takové situace nastanou, přestaňte výrobek používat a poraďte se s odborníkem.

Aplikace

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

INTRAORÁLNÍ OPRAVY NEPŘÍMÝCH NÁHRAD NA BÁZI KOVU

1) Příprava kovového povrchu

Zdrsněte lepený povrch hrubou diamantovou

frézou nebo pískováním. Opláchněte a osušte.

2) Příprava keramického povrchu

Na suchý povrch naneste ROYALRY ACID GEL po dobu 60 sekund pro feldspatickou a leucitovou keramiku a 20 sekund pro lithium-disilikátovou keramiku. Odsajte kyselinu vysokoobjemovým odsáváním, poté opláchněte vodou a vysušte vzduchem. Leptaná keramika by měla vypadat matně a vybledle.

POZNÁMKA: Intraorální použití kyseliny fluorovodíkové s sebou nese určitá rizika. Při použití kyseliny fluorovodíkové během intraorální opravy silikátové keramiky je třeba použít těsně přiléhající kofferdamovou blánu nebo bariérový gel a s kyselinou je třeba zacházet obzvlášť opatrně.

3) Aplikace směsi CERAMICA SILANE ACTIVATOR a NOVA COMPO B PLUS

Dávkujte po jedné kapce CERAMICA SILANE ACTIVATOR a NOVA COMPO B PLUS do směšovací misky a promíchejte je. Naneste směs na předem připravený keramický povrch pomocí aplikačního štětce a nechte působit 30 sekund a zaschnout.

POZNÁMKA: CERAMICA SILANE ACTIVATOR a NOVA COMPO B PLUS by se měly smíchat bezprostředně před aplikací.

4) Aplikace přípravku NOVA COMPO B PLUS

NOVA COMPO B PLUS naneste na všechny lepené plochy pomocí aplikačního štětce. Počkejte 20 sekund. Vysušujte maximálním tlakem vzduchu po dobu 5 sekund. Následujících 10 sekund vytvrzujte světlem.

5) Nanášení krycího laku

Nanášejte ELIXA OPAQUE pouze na kovový povrch a každou vrstvu vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund.

6) Použití kompozitního materiálu pro rekonstrukci

Vytvořte build-up pomocí kompozitu NOVA COMPO C a jednotlivé vrstvy vytvrzujte světlem. Dokončete opravu a případně vyleštěte.

INTRAORÁLNÍ OPRAVY NEPŘÍMÝCH NÁHRAD ZE SKLOKERAMIKY, SILIKÁTOVÉ KERAMIKY A HYBRIDNÍ KERAMIKY

1) Příprava povrchu

Zdrsňte lepený povrch hrubou diamantovou frézou nebo pískováním. Opláchněte a vysušte.

Na suchý povrch naneste ROYALRY ACID GEL na 60 sekund pro feldspatickou a leucitovou keramiku a na 20 sekund pro lithium-disilikátovou keramiku. Odsajte kyselinu vysokoobjemovým odsáváním, poté opláchněte vodou a vysušte vzduchem. Leptaná keramika by měla vypadat matně a vybledle.

POZNÁMKA: Intraorální použití kyseliny fluorovodíkové s sebou nese určitá rizika. Při použití kyseliny fluorovodíkové během intraorální opravy silikátové keramiky je třeba použít těsně přiléhající kofferdamovou blánu nebo bariérový gel a s kyselinou je třeba zacházet obzvlášť opatrně.

2) Aplikace směsi CERAMICA SILANE ACTIVATOR a NOVA COMPO B PLUS

Dávkujte po jedné kapce CERAMICA SILANE ACTIVATOR a NOVA COMPO B PLUS do směšovací misky a promíchejte je. Naneste směs na předem připravený keramický povrch pomocí aplikačního štětce a nechte působit 30 sekund a zaschnout.

POZNÁMKA: CERAMICA SILANE ACTIVATOR a NOVA COMPO B PLUS by se měly smíchat bezprostředně před aplikací.

3) Aplikace přípravku NOVA COMPO B PLUS

NOVA COMPO B PLUS naneste na všechny lepené plochy pomocí aplikačního štětce. Počkejte 20 sekund. Vysušte maximálním

tlakem vzduchu po dobu 5 sekund. Následujících 10 sekund vytvrzujte světlem.

4) Použití kompozitního materiálu pro rekonstrukci

Vytvořte build-up pomocí kompozitu NOVA COMPO C a jednotlivé vrstvy vytvrzujte světlem. Dokončete opravu a případně vyleštěte.

INTRAORÁLNÍ OPRAVY NEPŘÍMÝCH NÁHRAD ZE ZIRKONU A HLINÍKOVÉ KERAMIKY

1) Příprava povrchu

Zdrsňte lepený povrch hrubou diamantovou frézou nebo pískováním. Opláchněte a vysušte.

POZNÁMKA: Povrch zirkonu a hliníkové keramiky by se neměl připravovat leptáním kyselinou fluorovodíkovou / fosforečnou.

2) Aplikace přípravku NOVA COMPO B PLUS

NOVA COMPO B PLUS naneste na všechny keramické povrchy (včetně povrchu zubu) pomocí aplikačního štětce. Počkejte 20 sekund. Vysušte maximálním tlakem vzduchu po dobu 5 sekund. Následujících 10 sekund vytvrzujte světlem.

3) Použití kompozitního materiálu pro rekonstrukci

Vytvořte build-up pomocí kompozitu NOVA COMPO C a jednotlivé vrstvy vytvrzujte světlem. Dokončete opravu a případně vyleštěte.

INTRAORÁLNÍ OPRAVY KOMPOZITNÍCH NÁHRAD

1) Příprava povrchu

Zdrsňte lepený povrch hrubou diamantovou frézou nebo pískováním. Opláchněte a vysušte.

2) Aplikace přípravku NOVA COMPO B PLUS

NOVA COMPO B PLUS naneste na všechny kompozitní povrchy (včetně povrchu zubu)

pomocí aplikačního štětce. Počkejte 20 sekund. Vysušujte maximálním tlakem vzduchu po dobu 5 sekund. Následujících 10 sekund vytvrzujte světlem.

3) Aplikace kompozitu

Vytvořte build-up pomocí kompozitu NOVA COMPO C a jednotlivé vrstvy vytvrzujte světlem. Dokončete opravu a případně vyleštěte.

Varování

Vyhnete se použití přípravku u pacientů se známou přecitlivělostí na metakrylátové monomery. Pokud se u pacienta projeví reakce z přecitlivělosti, jako je vyrážka, ekzém, zánět, vřed, otok, svědění nebo necitlivost, přestaňte přípravek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepoužívejte tento výrobek, dokud si důkladně nepřečtete a neporozumíte tomuto návodu. Obsluha a asistent musí používat ochranné rukavice.

Vzhledem k tomu, že Royalry Acid Gel je silně žíravá kyselina, musí být při intraorální opravě porcelánu použita kofferdamová blána.

Při náhodném vniknutí do oka vyplachujte po dobu 15 minut velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kyselina fluorovodíková také uvolňuje výpary, které dráždí dýchací cesty. Chronické vdechování výparů je nebezpečné a může způsobit zdravotní problémy. Je třeba věnovat mimořádnou pozornost ochraně pacienta, obsluhy a asistenta.

Stříkačky znovu uzavřete luer lock uzávěrem. Doporučuje se používat běžně dostupný hygienický ochranný obal, aby nedošlo ke kontaminaci stříkaček během ošetření.

Před intraorální aplikací ověřte průtok leptacího gelu. Pokud se setkáte s odporem, vyměňte hrot a znovu zkontrolujte. Používejte pouze doporučené hroty.

Nepoužívejte stejný jednorázový štěteček pro různé pacienty, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se výrobek nedostal do kontaktu s pokožkou nebo do očí. Před použitím přípravku zakryjte pacientovi oči, abyste je ochránili v případě postříkání materiálem.

Buďte opatrní, abyste zabránili náhodnému požití přípravku pacientem.

Manipulace

Tento výrobek smí používat pouze licencovaný zubní lékař.

Pokud je ošetřený adhezní povrch kontaminován slinami nebo krví, opláchněte jej vodou, osušte, očistěte leptacím prostředkem (např. ROYALRY PORCELAIN ACID) a znovu ošetřete.

Použijte kofferdamovou blánu, abyste zabránili kontaminaci a kontrolovali vlhkost.

Zbytky přípravku na trysce nebo nádobce odstraňte pomocí kousku gázy nebo vatového tamponu napuštěného alkoholem.

Po použití hrot vyhodte a po každém pacientovi sterilizujte rukojeť štětečku.

Produkt může obsahovat prvky, které jsou určeny k jednorázovému použití. Zlikvidujte použité nebo kontaminované součásti a příslušenství.

Nepoužívejte přípravek k jiným účelům, než je uvedeno v INDIKACÍCH.

Likvidace

Viz ustanovení obce týkající se odpadů.

Nečisté obaly

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

Skladování

Mělo by být chráněno před slunečním zářením a mrazem.

Výrobek musí být spotřebován do data spotřeby uvedeného na obalu.

Skladujte při pokojové teplotě.

Přípravek musí být uložen na vhodném místě, kam mají přístup pouze zubní lékaři.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

