

**Složení**

Chlorhexidin glukonát, destilovaná voda

Indikace

- Používá se při ošetření kořenových kanálků, čištění a zvlhčení kanálku promýváním.
- Fyzikálně a chemicky odstraňuje zbytky měkkých a tvrdých tkání.
- Používá se k výplachům a dezinfekci kořenových kanálků.

Kontraindikace

- Ve vzácných případech se může vyskytnout alergická reakce. Když taková situace nastane, přestaňte výrobek používat a poraďte se s odborníkem.

Aplikace

Po odstranění vrstvy stěru kombinací EDTA a chlornanu sodného propláchněte kořenový kanálek 3 ml destilované vody. Každý kanálek propláchněte 5 ml roztoku chlorhexidinu a počkejte 3 až 5 minut. Sušení je hotovo.

Vedlejší účinky

Dosud nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Skladování

Přípravek uchovávejte v chladném prostředí. Skladovací teplota by se měla pohybovat mezi 1 až 30 °C. Před aplikací nechejte přípravek dosáhnout pokojové teploty.

Likvidace

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. Uložte na schválenou skládku nebo do spalovny odpadu za podmínek schválených místním úřadem.

Kontaminované obaly

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

Upozornění

- Uchovávejte mimo dosah dětí!
- Pouze pro použití ve stomatologii!
- Dráždivý: zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi!
- Přípravek nikdy nepijte!
- Dodržujte pokyny v návodu k použití.
- Za škody způsobené nedodržením pokynů nebo stanovené oblasti použití nenese výrobce odpovědnost.
- Uživatel je odpovědný za testování materiálu z hlediska jeho vhodnosti pro jakýkoli účel, který není výslovně uveden v návodu.
- Uvedené definice a informace nepředstavují záruku ani nejsou závazné.

Balení

- 250 ml

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

Poslední revize návodu:

Rev 00 13.01.2021 TD-00-IFU-00

Přeloženo: 25.11.2022

