

Dávkovací plán pro koncentráty



**FD 300,
FD 312**

Dezinfekce povrchů



**ID 212, ID 212 forte plus,
ID 213**

Dezinfekce nástrojů

ID 215
Enzymatický čistič nástrojů



**Orotol plus,
Orotol plus pH 7**

Dezinfekce
sacích systémů



**MD 555 cleaner,
MD 555 cleaner
organic**

Speciální čistič sacích
systémů

Požadované množství roztoku	1%		2%		5%	
	ml	Počet plných víček	ml	Počet plných víček	ml	Počet plných víček
1 L	–	–	20	1	–	–
2 L	20	1	40	2	100	5
3 L	–	–	60	3	–	–
4 L	40	2	80	4	200	10
5 L	–	–	100	5	–	–
6 L	60	3	120	6	300	15
7 L	–	–	140	7	–	–
8 L	80	4	160	8	400	20
9 L	–	–	180	9	–	–
10 L	100	5	200	10	500	25

Víčko je třeba naplnit až po rysku 20 ml vyznačenou uvnitř.