



DENTO-VIRACTIS INSTRUGERM 52

Ředění:
0,5 %

Popis	Dento-Viractis Instrugerm 52 je koncentrát, který se používá pro předdezinfekci dentálních a chirurgických nástrojů a invazivních lékařských přístrojů. Lze použít v ultrazvukové čističce. 
Použití	Použití na lékařské přístroje, dentální a chirurgické nástroje, endoskopy aj.
Balení	Láhev o objemu 1 litr s odměrkou Kanystr o objemu 5 litrů

Antimikrobiální aktivita			Koncentrace	Doba kontaktu
Baktericidní	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5 %	15 min
	EN 13697			
	EN 1276			
	EN 14561	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5 %	15 min
Kvasinkový	EN 13624	Candida albicans	0,5 %	15 min
	EN 13697			
	EN 1650			
	EN 14562	Candida albicans	0,5 %	15 min
Virucidní	EN 14476	Herpes virus	0,5 %	15 min
		Hepatit B		
		Hepatit C		
	EN 17111	Vaccina virus	0,5 %	15 min



DENTO-VIRACTIS INSTRUGERM 52

DENTO-VIRACTIS

Instrukce k použití	Koncentrace: 0,5 % (5 ml/L) = (25 ml/5L). Kontaktní doba: 15 minut. Teplota: 20°C.
Opatření	Viz Bezpečnostní list materiálu. POZOR Způsobuje těžké podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé nepříznivé účinky. ZASAZENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktujte lékaře.
Pokyny pro použití	1. Vložte nástroje do připravené lázně, dbejte na to, aby byly zcela ponořeny. 2. Kontaktní doba: 15 minut. 3. Důkladně opláchněte vodou z vodovodu (cca 20°C), osušte, sterilizujte. 4. Obnovte roztok, jakmile je viditelně znečištěný nebo nejpozději každých 72 hodin. Předdezinfekční lázeň nepoužívejte opakovaně nebo se řiďte místními doporučeními. Nemíchejte s jinými produkty. Obal je nutné zlikvidovat jako nebezpečný odpad na výhradní odpovědnost držitele odpadu. Nelikvidujte, nevyhazujte zbytky do kanalizace nebo vodních toků. Jakýkoli vážný incident se zařízením by měl být hlášen výrobcí a příslušnému úřadu. Zkontrolujte kompatibilitu ošetřeného materiálu s materiály testovanými v korozních studiích COR010449: kompatibilita se surovou ocelí, nerezovou ocelí, hliníkem, mědí, pláštěm endoskopů, HDPE, polysulfonem, PVC, silikonem, wolframem, vitonem a mosazí; a citlivost bichromované oceli, pozinkované oceli a zinku.
Značení	 

Značka CE0459 získaná v roce 2019. Verze 1.0. ze dne 09/2021

Distribuce par:
CADENCE
2 bis, chemin du loup 93290
Tremblay-en-France
FRANCIE



LABORATOŘ FRANK
3 avenue des Frênes
ZA de l'Observatoire
78180 Montigny-le-Bretonneux
FRANCIE