



DENTO-VIRACTIS ENZYMATIC

54

Ředění:
0,5 %

Popis

Dento-Viractis Instrugerm 54 je koncentrát s trienzymatickým komplexem (proteáza, amyláza, lipáza), který se používá pro předdezinfekci zdravotnických prostředků.

Lze použít v ultrazvukové čističce.

Krátká doba působení.
Výborné čistící vlastnosti.



Použití

Použití na dentální a chirurgické nástroje, invazivní lékařské přístroje.

Balení

Láhev o objemu 1 litr s odměrkou.
Kanystr o objemu 5 litrů.

DENTO-VIRACTIS

Antimikrobiální aktivita			Koncentrace	Doba kontaktu
Baktericidní	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5 %	5 min
	EN 14561	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5 %	10 min
Kvasinkový	EN 13624	Candida albicans	0,5 %	5 min
	EN 14562	Candida albicans	0,5 %	10 min
Virucidní	EN 14476	Herpes virus	0,5 %	5 min
		Hepatit B		
		Hepatit C	0,5 %	10 min
		HIV		
	EN 17111	Vaccina virus	0,5 %	10 min



DENTO-VIRACTIS ENZYMATIC 54

DENTO-VIRACTIS

Instrukce k použití	Koncentrace: 0,5 % (5 ml/L) = (25 ml/5L). Kontaktní doba: 10 minut. Teplota: 20°C.
Opatření	Viz Bezpečnostní list materiálu. NEBEZPEČÍ. PŘÍPAD 94667-33-1: N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY (OXYETHYL) AMONIUM PROPIONÁT. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé nepříznivé účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je nosíte a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Pokyny pro použití	1. Vložte nástroje do připravené lázně, dbejte na to, aby byly zcela ponořeny. 2. Kontaktní doba: 10 minut. 3. Důkladně opláchněte vodou z vodovodu (cca 20°C), osušte, sterilizujte. 4. Obnovte roztok, jakmile je viditelně znečištěný nebo nejpozději každých 72 hodin. Nepoužívejte předdezinfekci opakovaně (nebo dodržujte místní doporučení). Nemíchejte s jinými produkty. Obal musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad na výhradní odpovědnost držitele tohoto odpadu. Nevylévejte zbytky do kanalizace nebo vodních toků. Jakýkoli vážný incident týkající se zařízení by měl být oznámen výrobci a příslušnému úřadu. Zkontrolujte kompatibilitu ošetřeného materiálu s materiály testovanými v korozní studii COR010435_mat: kompatibilita s nerezovou ocelí, hliníkem, HDPE, silikonem, pouzdra endoskopů, wolframem, vitonem, mosazí a PVC.
Značení	 

Značka CE0459 získaná v roce 2019. Verze 1.0. ze dne 09/2021

Distribuce par:

CADENCE

2 bis, chemin du loup 93290
Tremblay-en-France
FRANCIE



LABORATOŘ FRANK

3 avenue des Frênes
ZA de l'Observatoire
78180 Montigny-le Bretonneux
FRANCIE