

Dento-Viractis 57 Rotary

POPIS: DENTO-VIRACTIS 57 Rotary Instruments je doporučený pro čištění a dezinfekci vrtáčků a rotačních nástrojů před sterilizací. Přímo k použití.

ROZSAH POUŽITÍ: Použití pro kontaminované znovu použitelné vrtáčky a rotační nástroje.

CHARAKTERISTIKA:

- Odstraňuje rezidua proteinu a minerálů
- Obsahuje anti-korozní přísady
- Přímo k použití
- Kompatibilní s ultrazvukovými čističkami

BALENÍ: 2 litrový kanistr přímo k použití, 5 litrový kanistr přímo k použití

ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – DOBA KONTAKTU:

- BAKTERICIDNÍ: EN 1040 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 5 min; EN 13727 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae 15 min; EN 14561 - 15 min; NF T 72-190 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - 5 min; NF T 72-301 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli - 5 min
- FUNGICIDNÍ: EN 1275 - Candida albicans - 15 min; EN 13624 - Candida albicans, Aspergillus Niger - 15 min; EN 14562 15 min
- VIRUCIDNÍ: EN 14476 - Hepatitis B - 5 min, Herpes virus simplex typ 1 - 1 min; EN 14476 - BVDV (HCV) - 1 min; NF T 72-180 - Enterovirus polio 1, Adenovirus typ 5, Orthopoxvirus - 15 min

SLOŽENÍ: Ethylalkohol, Hydroxid draselný, Ethoxylovaný alkohol

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje hydroxid draselný. Obsahuje D-Limonen a Linalool. Může způsobit alergickou reakci.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

1. Úplně ponořte nástroje do roztoku
2. Čas ponoření: 15 minut
3. Důkladně opláchněte

Roztok musí být vyměněn, jakmile dojde k jeho znečištění nebo jednou denně.

RIZIKOVÉ FRÁZE: R10 – Hořlavé, R22 – Nebezpečné při pozření, R34 – Způsobuje popáleniny

BEZPEČNOSTNÍ FRÁZE: S2 – Udržujte mimo dosah dětí; S26 – V případě vniknutí do očí okamžitě vypláchněte silným proudem vody a vyhledejte lékařské ošetření; S36/37/39 – Používejte odpovídající ochranné pomůcky – oblečení, rukavice a ochranu očí; S45 – V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte ihned lékařské ošetření (ukážte etiketu, pokud to bude možné); S60 – Tento materiál a jeho kanistr musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad

CE CERTIFIKÁT OBDRŽEN V ROCE 2008. VEZRE LISTU: 1.0

VÝROBCE: HYGITECH – 25, rue Bleue – 75009 PARIS – France

