

**Složení**

Chlornan sodný (5,25 %), destilovaná voda

**Indikace**

- Používá se při ošetření kořenových kanálků, čištění a zvlhčení kanálku promýváním.
- Fyzikálně a chemicky odstraňuje zbytky měkkých a tvrdých tkání.

**Kontraindikace**

- Ve vzácných případech se může vyskytnout alergická reakce. Když taková situace nastane, přestaňte výrobek používat a poraďte se s odborníkem.

**Aplikace**

Po odstranění vrstvy stěru kombinací EDTA a chlornanu sodného propláchněte kořenový kanálek 3 ml destilované vody. Každý kanálek propláchněte 5 ml roztoku chlorhexidinu a počkejte 3 až 5 minut. Sušení je hotovo.

**Vedlejší účinky**

Dosud nejsou známy žádné vedlejší účinky.

**Skladování**

Přípravek uchovávejte v chladném prostředí. Skladovací teplota by se měla pohybovat mezi 1 až 30 °C. Před aplikací nechejte přípravek dosáhnout pokojové teploty. Přípravek nepoužívejte po datu spotřeby.

**Likvidace**

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. Uložte na schválenou skládku nebo do spalovny odpadu za podmínek schválených místním úřadem.

**Kontaminované obaly**

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

**Upozornění**

- Uchovávejte mimo dosah dětí!
- Pouze pro použití ve stomatologii!
- Dráždivý: zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi!
- Přípravek nikdy nepijte!
- Dodržujte pokyny v návodu k použití.
- Za škody způsobené nedodržením pokynů nebo stanovené oblasti použití nenese výrobce odpovědnost.
- Uživatel je odpovědný za testování materiálu z hlediska jeho vhodnosti pro jakýkoli účel, který není výslovně uveden v návodu.
- Uvedené definice a informace nepředstavují záruku ani nejsou závazné.

**Balení**

- 250 ml, 500 ml, 1000 ml

**Dovozce a distributor:**

Janouch Dental s.r.o.  
Hradišťská 161  
735 62 Český Těšín  
info@janouch-dental.cz  
+420 604 251 198