

ID 212 forte plus

CZ Dezinfekce nástrojů

Varování



CE 0124



orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, DE
a DÜRR DENTAL company
Tel: +49 7142 705-0
info@duerrdental.com · www.duerrdental.com
Made in Germany



E:2FP.01.02.50-2024-10

06.11.24 18:00

Aplikace	vztah mezi koncentrací a časem
----------	--------------------------------

Doporučená aplikace pro dezinfekci nástrojů podle VAH: Baktericidní / kvasinkocidní 2 % - 5 min.

Typ aktivity	Testováno podle	vztah mezi koncentrací a časem
--------------	-----------------	--------------------------------

Bakterie / kvasinky

Baktericidní / kvasinkocidní EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 2 % - 5 min.

Baktericidní / kvasinkocidní v ultrazvukové lázni EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 2 % - 5 min.

Tuberkulocidní účinek v ultrazvukové lázni EN 14348, EN 14563 2 % - 60 min.

Viry

Virucidní účinek proti obaleným virům (obalené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů) EN 14476, EN 17111 2 % - 15 min.

Směrnice DVV/RKI 2 % - 1 min.

Adenoviry EN 14476, EN 17111 4 % - 30 min.

Noroviry EN 14476, EN 17111 4 % - 60 min.

Přípravek ID 212 forte plus je vysoce účinný bezaldehydový koncentrát k manuálnímu čištění a dezinfekci obecných a chirurgických nástrojů (např. zrcadel, sond, pinzet, kleští atd.) a rotačních nástrojů citlivých na zásadité a alkoholické složky ve stomatologických ordinacích a laboratořích a na stomatologických lůžkových odděleních.

Je zvláště vhodný také na nástroje s pryžovými/silikonovými částmi ze slitiny niklu a titanu a na určité rotační nástroje lepené umělou pryskyřicí. Přípravek ID 212 forte plus je šetrný k materiálu.

Složení: 100 g ID 212 forte plus obsahuje 9 g alkyl-benzyl-dimethyl-amonium-chloridu, 0,1 g 1-kokoalkylguanidinium-chloridu, komplexotvorné složky, tensidy, linalool a pomocné látky.

Spektrum účinnosti: Baktericidní, levurocidní, tuberkulocidní v ultrazvukovém přístroji, omezeně virucidní (obalené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů), neobalené adenoviry a noroviry.

ID 212 forte plus je uveden v seznamu VAH a v seznamu dezinfekčních prostředků IHO.

Zkoušeno za vysokého organického zatížení podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 a podle směrnice DVV/RKI.

Použití: Přípravek ID 212 forte plus používejte k čištění ve 2% koncentraci s dobou expozice 5 minut. Za tímto účelem dávkujte např. 20 ml přípravku ID 212 forte plus pomocí odměrky v uzávěru (značení odpovídá 20 ml) a doplňte vodou na 1 litr. Instrumentárium po čištění důkladně opláchněte pod tekoucí vodou, popř. ručně dočistěte. Použitý čisticí roztok každý pracovní den vyměňte. Vyčištěné nástroje následně vydezinfikujte pomocí ID 212 forte plus. Přípravek ID 212 forte plus se používá ve formě 2% nebo 4% roztoku. Doba působení 2% roztoku je podle VAH 5 minut (baktericidní/levurocidní účinek). K inaktivaci virů dojde u 4% roztoku za 60 minut a k inaktivaci mykobakterií TBC v ultrazvukovém přístroji dojde u 2% roztoku za 60 minut (viz tabulka). Dezinfikované instrumentárium po kontaktní době důkladně oplachujte minimálně 15 s pod tekoucí vodou a osušte. Roztok dezinfekčního prostředku používejte maximálně po dobu 7 dnů, podle stupně znečištění. Při viditelném znečištění se roztok dezinfekčního prostředku musí ihned vyměnit. U nástrojů se zvláštními požadavky na přípravu je třeba dodržovat údaje výrobce i specifické normy příslušné země. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Upozornění: Přípravek ID 212 forte plus používejte v uzavřené vaně na nástroje. Přípravek ID 212 forte plus nesměšujte s jinými přípravky. Dodržujte pokyny výrobce nástrojů týkající se materiálové snášenlivosti, údržby a přípravy. Změny barvy a zápachu přípravku ID 212 forte plus během skladování nenaruší jeho účinnost. Výrobek smí používat pouze odborní pracovníci. Všechny závažné příhody, které se vyskytnou v souvislosti s tímto produktem, musejí být neprodleně ohlášeny výrobcí a kompetentním úřadům v příslušném členském státě.

Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.



viz potisk.

ID 212 forte plus_RS_2,5L_INT_2024-10.indd

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

