

Interlig

- Impregnovaná dlaha ze skelných vláken tuhnoucí světlem

Složení :

- skelná vlákna (hmotnost) – 60+-5%
- napuštěná pryskyřice 40+-5%: Bis-GMA, diurethan, barium , oxid křemičitý, katalyzátor

Charakteristika :

- struktura vláken : propletené
- průsvitné
- 0,2 mm tenké
- šířka 2mm
- délka 8,5cm

Indikace :

- dlahování v obl. ortodoncie, perio-, a u vytržených zubů
- posílení pryskyřice při upevňování můstků a u provizorních můstků prováděných přímo v ordinaci nebo v laboratoři
- zpevnění a oprava akrylové pryskyřice
- výroba náhradních retainerů v dětské stomatologii

Použití :

- a) předoperační vyšetření
- b) izolujte kofferd.blánou a umístěte klínky
- c) pomocí tužky vymezte oblast pro řezání drážky
- d) udělejte 0,8mm hlubokou a 2,mm širokou drážku
- e) leptejte 37% kys. fosforečnou po dobu 30 sek., opláchněte a vysušte
- f) aplikujte adhezivum
- g) posviťte vytvrzovací lampou na všechny místa dlahy po dobu 20 sek.
- h) vyplňte polovinu drážky hybridní nebo mikrohybridní kompozitní pryskyřicí
- i) uřízněte část dlahy o něco méně než je délka drážky, umístěte dlahu Interlig do drážky a stlačte pryskyřicí
- j) jemně přitlačte a na každou část dlahy posviťte 20 sek.
- k) aplikujte druhou vrstvu kompozitní pryskyřice
- l) posviťte 40 sek. na každý článek
- m) odstraňte přebytečnou pryskyřice
- n) aplikujte finální vrstvu adheziva, 20 sek. posviťte lampou

Interlig dlaha musí být vždy pokryta kompozitní pryskyřicí, všechna vyčnívající vlákna lze odstranit lehce vrtáčkem.

Interlig dlaha může vyvolat alergickou reakci. Proto používejte ochranné pomůcky- brýle, rukavice, masku.

Dlahu skladujte v suchu, chraňte před světlem, skladujte do 28°C.