



Polymerační lampa

LED-1007

Bezdrátová LED jednotka
pro vytvrzování světlem



Návod k použití


Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali **Curing Light LED-1007**. Z bezpečnostních důvodů a pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím produktu pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Tato uživatelská příručka popisuje normální vlastnosti vytvrzovací lampy LED-1007 a uvádí zásady bezpečnosti, instalace, použití a údržby. Neustále se snažíme vylepšovat naše produkty, což může vést k malým změnám komponentů.

Před prvním použitím prosím zkontrolujte příslušenství a ujistěte se, že je vše v dobrém stavu.

1. Hlavní jednotka, 2. Světlovod, 3. Baterie, 4. Stanice, 5. Adaptér, 6. Clona, 7. Uživatelská příručka

Struktura

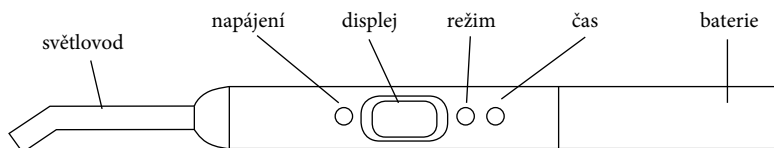

Specifikace

Rozměry:	průměr 22 x 175 mm (LED světlo)
Hmotnost:	165 g
Bezpečnostní třída:	běžný typ B, přerušovaný provoz, IP 40, třída II
Vstupní napětí:	100-240 V, 50-60 Hz
Kapacita baterie:	2200 mAh
Vlnová délka:	430-485 nm
Intenzita:	0,5W>1100 mW/cm ²
Polymerace:	10s, > 3mm (5W)

Použití



Nabíjení baterie

Připojte adaptér do elektrické sítě a poté připojte adaptér k nabíječce. Umístěte násadec na nabíječku. Při nabíjení svítí indikátor nabíjení (**žlutý**) a indikátor napájení (**zelený**) nesvítí. Když je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení (**žlutý**) nesvítí a indikátor napájení (**zelený**) svítí.

Při prvním použití nové baterie je nejlepší ji nabíjet 6-7 hodin, ale neměla by být nabíjena déle než 7 hodin.

Když je baterie plně nabitá, odpojte adaptér z elektrické sítě.



Provoz

[P] Zapnutí / vypnutí:

Když je jednotka vypnutá nebo v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka napájení spustíte jednotku, výstup světla se rozsvítí modře, dalším stisknutím tlačítka zastavíte práci a přepnete se do pohotovostního režimu.

[M] Pracovní režim:

Stisknutím tlačítka režimu vyberte ze tří typů pracovního režimu:

- 01 Postupný režim / Ramping
- 02 Režim blikání
- 03 Režim plného osvětlení

[T] Čas:

Stiskněte tlačítko pro výběr času.

Čtyři režimy: 10, 20, 30 a 40 sekund.

- Když zařízení pracuje, ozve se pípání každých 5 sekund.
- Zařízení se **automaticky vypne**, když je v nečinnosti po dobu 8 minut.
- Pokud je při zahájení práce výkon jednotky a napětí baterie nižší než požadovaná úroveň, jednotka vydá **výstražné upozornění**: 5krát zapípá a indikátor zabliká. Prosím, nabijte baterii včas.

Upozornění

1. Pracovní doba mezi každou manipulací není kratší než 30 sekund.
2. Vyměňte světlovod, pokud je prasklý nebo poškrábaný.
3. Dezinfekce světlovodu: ponořte na několik minut do 75% alkoholu.
4. Když je baterie plně nabitá, odpojte napájení.
5. Nedotýkejte se elektrod baterie kovem.
6. Pravidelně čistěte piny v nabíječce hadříkem s bezvodým alkoholem, aby se zabránilo slabému kontaktu nabíječky s násadcem.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.

Hradištská 161

735 62 Český Těšín

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198



MD



FOSHAN CICADA DENTAL INSTRUMENT CO., LTD

B5-2F, Guangdong New Light Source Industrial Base,
Nanhai District, Foshan, Guangdong, 528226, P.R. CHINA

EC REP

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague – NETHERLANDS

IMP

CADENCE

2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France - FRANCE

