



5020A0006, Rev.B



Retraktory tváří BEYOND® FlexiBlue® jsou dodávány v balení po pěti kusech společností BEYOND®. Nejsou součástí léčebných sad Max5. Pro objednání kontaktujte svého distributora produktů BEYOND®.

Postup ošetření (Podrobnější pokyny naleznete v návodu k použití přiloženém k bělící lampě BEYOND® Whitening Accelerator.)

PŘED OŠETŘENÍM

Krok 1: Proveďte vstupní vyšetření dutiny ústní a konzultaci s pacientem ohledně požadovaného výsledku bělení, aby bylo možné stanovit nejvhodnější léčebný plán podle individuální situace pacienta.

BĚLÍCÍ OŠETŘENÍ

Krok 2: Aplikujte ochranný krém na rty a vložte retractor tváří BEYOND® FlexiBlue®. Určete stávající odstín zubů. (viz obr. 1 a 2)

Krok 3: Nasadte pacientovi ochranné brýle.

Krok 4: Umístěte vatové válečky po obou stranách frenula horního a dolního rtu. V případě potřeby naneste další ochranný krém na rty. (viz obr. 3)

Krok 5: Osušte zuby a dásně. Aplikujte gingivální ochranu BEYOND® BlueSeal® a vytvrzujte ji světlem krouživým pohybem. (viz obr. 4 a 5)

Krok 6: Připevněte míchací kanylu k dvoukomorové stříkačce s bělícím gelem a naneste 2–3 mm vrstvu bělícího gelu BEYOND® na suchý povrch zubů. (viz obr. 6)

Krok 7: Nastavte hlavici lampy BEYOND® Whitening Accelerator do úhlu 90° vůči zubům pacienta a stisknutím tlačítka Start zahajte první 10minutový cyklus. (viz obr. 7)

Krok 8: Po ukončení 10minutového cyklu odstraňte bělící gel pomocí suché odsávačky. NEOPLACHUJTE VODOU. Opakujte kroky 5–7 ještě dvakrát, celkem tedy absolvujte tři 10minutové bělicí cykly.

PO OŠETŘENÍ

Krok 9: Po ukončení posledního 10minutového cyklu odstraňte gel, gingivální ochranu, retractor tváří, gázu a ochranné brýle a požádejte pacienta, aby si vypláchl ústa teplou vodou.

Krok 10: Ukažte pacientovi nový odstín jeho zubů. (viz obr. 8)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Těhotným ženám a osobám mladším 18 let se zákrok nedoporučuje.

Pokud pacient hlásí výraznou citlivost zubů, bělicí proceduru ukončete a před aplikací fluoridace odstraňte veškerý bělící gel.

Symbol Význam	Symbol Význam	Symbol Význam
Viz návod k použití	Použitelné do	Datum výroby
Upozornění	Číslo šarže	Teplotní limit
Chraňte před slunečním zářením	Výrobce	