

OliNano SEAL

TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ LAK

CZ NÁVOD K POUŽITÍ



POPIS PRODUKTU

OliNano SEAL je jednosložkový lak na silikonové bázi chránící před kyselinami s nano-fluorapatitem a nano-fluoridem vápenatým pro utěsnění zubů. Je známo, že nano částice fluorapatitu zvyšují remineralizaci zubní hmoty.

OliNano SEAL nevyžaduje leptání. Vytváří ochranný film, který lze v případě potřeby obnovit nebo opravit podle vašich představ. Aplikace je snadná a časově nenáročná.

OliNano SEAL obsahuje 2000 ppm (0,2 %) fluoridu.

INDIKACE / ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Ochrana před zubním kazem u všech pacientů bez ohledu na věk, odstranění přecitlivělosti způsobené odhalením zubních krčků
- Ochrana před dekalifikací u pacientů, kteří používají fixní ortodontické aparáty
- Dočasné utěsnění náhrad s marginálním únikem
- Zaručená dlouhodobá ochrana proti zabarvení zubů

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Funkční vlastnosti výrobku splňují požadavky na zamýšlené použití.

KONTRAINDIKACE

Otisky s vinylovými silikony lze zhotovit nejdříve 4 týdny po ošetření přípravkem OliNano SEAL.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby, které jsou ošetřeny během stomatologického zákroku.

URČENÍ UŽIVATELE

Tento zdravotnický prostředek smí používat pouze odborně vyškolený zubní lékař.

APLIKACE

Zuby bez kazu se důkladně vyčistí pastou bez oleje, vyleští a vysuší proudem vzduchu bez oleje a vody.

Před aplikací lahvičku s přípravkem dobře protřepejte. Během protřepávání uslyšíte pohyb skleněné kuličky uvnitř lahvičky.

Naneste přípravek 2 až 3krát v rovnoměrné tenké vrstvě. Vyhněte se kontaktu se sliznicí. Nechte **1 minutu** zaschnout nebo jemně vysušte proudem vzduchu bez oleje.

Po použití lahvičku ihned uzavřete.

DŮLEŽITÉ PŘIPOMÍNKY

- První 2 hodiny po aplikaci přípravku nic nejete ani si nečistíte zuby.
- V případě ochrany zubů přípravkem OliNano SEAL při ortodontické multi-band technice se **před** aplikací přípravku na zuby nasadí rovnátka.
- Intenzivní vůně přípravku se během schnutí do 1 minuty vytratí.
- OliNano SEAL obsahuje ethylacetát. Ethylacetát je vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Vyvarujte se vdechování par ethylacetátu. Po zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody a zavolejte oftalmologa. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
- Otisky s vinylovými silikony lze zhotovit nejdříve 4 týdny po ošetření přípravkem OliNano SEAL.

- Zabraňte znečištění přípravku OliNano SEAL znečištěnými jednorázovými kartáčky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí!

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C! Skladujte chráněné před vlhkostí! Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti!

LIKVIDACE

Likvidace výrobku v souladu s předpisy místních úřadů.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Podle nařízení EU o zdravotnických prostředcích musí být závažné incidenty, ke kterým došlo v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, hlášeny výrobcí a příslušnému úřadu.

ZÁRUKA

Společnost SanaPro Dental GmbH zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu a výrobních vad. Společnost SanaPro Dental GmbH neposkytuje žádné další záruky, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro jeho použití. Pokud je tento výrobek v záruční době vadný, je vaší výhradní nápravnou možností a jedinou povinností společnosti SanaPro Dental GmbH oprava nebo výměna výrobku.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno zákonem, společnost SanaPro Dental GmbH nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s tímto výrobkem, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné, bez ohledu na uplatněnou teorii, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo objektivní odpovědnosti.

BALENÍ

1× lahvička 5ml

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



OLIDENT

Výrobce:
SanaPro Dental GmbH, Stresemannstrasse 46
27570 Bremerhaven, Německo

Olident Sp.z o.o., Podłęża 653, 32-003 Podłęża, Polsko
www.olident.com

Scan to find out more



CE 0482

MD Zdravotnický prostředek

MADE
in
GERMANY

Poslední revize návodu: 1_EN_DE_PL_13012023SP
Přeloženo dne: 23. 7. 2024