

Návod k použití – OliOrange

CZ

Aplikace

Povrchové čištění nábytku a nerezových povrchů v zubních ordinacích a laboratořích. Čištění otiskovacích lžic. Přípravek OliOrange může poškodit akrylové povrchy.

Způsob použití

Smíchejte s vodou v závislosti na intenzitě nečistot, které je třeba vyčistit.

Kvalita

Odstraňuje zbytky silikonu, alginátů, zinko-eugenolových past a krve. Není vhodný pro použití v ultrazvukových čističkách.

Rizika

Nepijte a nepolykejte, v případě požití tekutiny vyhledejte lékaře. Zabraňte kontaktu s kůží a očima, může způsobit podráždění.

Likvidace

Nevylévejte do kanalizace v neředěném stavu.

**Výrobce:**

Olident Sp. zo o., Sp. k.
Christo Botewa 1B
30-798 Kraków, Polsko

Dodavatel:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

