

Vlastnosti a výhody

Samolepící intraorální obvaz na ochranu ran v ústní dutině


- Pokročilý koncept intraorálního krytí
- Chrání rány před jídlem, bakteriemi a cigaretovým kouřem
- Pomáhá při hemostáze
- Chrání před podrážděním jazyka šicí nití
- Silná adheze pomocí hydrofilního polymeru
- Snadné řezání do různých tvarů/velikostí
- Snadné nalepení pomocí slin
- Snižuje podráždění v ústech
- Bezpečné a snadné použití
- Máťová příchut' snižuje halitózu
- Obsahuje vitamín E



Použití

Použitelné ve všech případech v dutině ústní k ochraně intraorálních ran

- Podpora hojení po chirurgických zákrocích
- Otevřené rány a otevřené stehy
- Vředová bolest
- Ochrana před podrážděním jazyka šicí nití
- Ochrana před bolestí při ortodontické léčbě
- Ochrana citlivých zubů
- Pomáhá při hemostáze

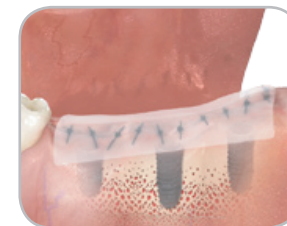

Implantace



Chirurgie



Parodont




Extrakce



Rovnátka



Stomatitida

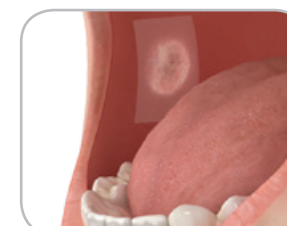

Orální rána



Infekce

VIDEO ZDE



"Ora-Aid Video"

Pokyny a skladování

• Pokyny



1. Vypláchněte ránu sterilním nebo fyziologickým roztokem.
2. Ustříhněte požadovaný tvar a rozměr.
3. Jemně odstraňte z rány vlhkost pomocí gázy.
Nadměrná exsudace může způsobit slabou adhezi.
4. Odstraňte průhlednou fólii a aplikujte na ránu.
5. Jemně stiskněte 5-10 vteřin, abyste obvaz dobře držel.

Nesprávné použití

▼ Pohybující se sliznice a jazyk



▼ Příliš mnoho slin a krve



▼ Prostor vzniklý nesprávným připevněním



▼ Chronický vřed (nezlepšující se během měsíce) a těžký zánět



▼ Suchá rána



Doporučení při používání

- Ve srovnání s pohyblivou sliznicí se doba přichycení na gingivě, horní čelisti a patře prodlužuje.



• Skladování

1. Skladujte při teplotě 1°C – 35°C, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.
2. Nedodržení podmínek skladování může vést ke snížení adheze a absorpce.
3. Spotřebujte do: 3 let



Pozor

Před použitím

1. Před použitím si prosím pozorně přečtěte pokyny.
2. Nepoužívejte, pokud se produkt před použitím zdá poškozený nebo znečištěný.
(Bubliny v produktu pocházejí z výrobního procesu a jsou bezpečné.)
3. Tento zdravotnický prostředek je na jedno použití. Při opětovném použití může produkt způsobit infekci, křížovou infekci a zánět.

Během použití

1. Pokud zaznamenáte jakýkoli otok, alergickou reakci, žaludeční nevolnost nebo jakékoli známky infekce, poraďte se se svým lékařem.
2. Nepoužívejte na hluboké rány s nadměrným krvácením.
3. Neodstraňujte Ora-Aid silou. Po úplném rozpuštění lepicí strana krytí automaticky odpadne.
4. Po rozpuštění odstraňte ochrannou stranu z rány.
5. Zvláštní pozornost věnujte odstranění ochranné strany před spaním nebo v případě malých dětí (do 5 let).

- * Přílnavost Ora-Aid trvá přibližně 6-12 hodin, avšak skutečná doba závisí na orálním prostředí.