

Orotol[®] plus



Dezinfekce odsávacích zařízení



Orotol[®] plus je vysoce účinný koncentrát pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a péči o stomatologická odsávací zařízení a plivátka. Je vhodný pro všechny separátory amalgámu. Vybrané dezinfekční a čisticí složky dosahují intenzivní péče, a přitom jsou šetrné k materiálům a životnímu prostředí. Přípravek nepění.

Složení: 100 g Orotol[®] plus obsahuje: 8,8 g dimethyl-dioktyl-ammoniumchloridu 50 %, 1,2 g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchloridu 50 %, 5 - 15 g alkalické čisticí složky, < 5 g komplexotvorné látky, speciální látky zabraňující pění, pomocné látky.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, fungicid¹⁾, omezeně účinný i virucidní²⁾ (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV a také neobalené viry, jako adenoviry, noroviry³⁾).

Seznam VAH/DGHM. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Testováno s *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.

2) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 - 66, 2004).

3) Zkouška na náhradním viru MNV.

Použití: Orotol[®] plus se používá v 2 % koncentraci. Příklad ředění: 20 ml Orotol[®] plus (odpovídá měrce v uzávěru) doplňte studenou vodou do 1 litru a za použití OroCup odsajte. Doba působení je v souladu s VAH/DGHM 5 minut, pro bakterie vč. Tbc 60 minut (viz tabulka v DE). Doporučujeme odsávací zařízení dezinfikovat a čistit přípravkem Orotol[®] plus v závislosti na provozu jedenkrát až dvakrát denně - před polední pauzou a po ukončení ošetření; při jednorázovém použití pak výhradně večer po ukončení provozu. Plivátka event. ještě vydezinfikujte a vyčistěte dodatečně přípravkem Orotol[®] plus.

Pokyny: Po chirurgických zákrocích nárazově sáním propláchněte sklenicí studené vody. Neaplikujte do sacího zařízení ani plivátka žádné pěnicí látky.




viz potisk.

Nebezpečí. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Noste ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

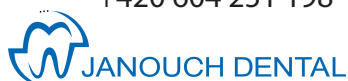

Diocetyl-dimethyl-ammonium chloride
CAS-No. 5538-94-3
Potassium hydroxide CAS-No. 1310-58-3



DÜRR DENTAL AG
Höfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel: +49 7142 705-0
info@duerr.de · www.duerr.de
Made in Germany



E:111.18.02.50-2015-07

