

PROSIMI

EDTA Gel

Návod k použití



JANOUC DENTAL



Popis

Čistící gel s obsahem 17% kyseliny ethylendiamintetraoctové. Používá se při irigaci a čištění kořenových kanálků.

Složení

Kyselina ethylendiamintetraoctová, polyethylenglykol, destilovaná voda, zahušťovadlo

Indikace

Používá se při ošetření, čištění a zvlhčování kořenových kanálků. Chemicky odstraňuje anorganické usazeniny.

Kontraindikace

Přípravek nepoužívejte mimo systém kořenových kanálků nebo na měkké tkáně. Po kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte postižené místo mýdlem a vodou, v případě zasažení očí je důkladně vypláchněte proudem vody.

Aplikace

- Před vstupem do kořenového kanálku izolujte oblast pomocí kofferdamu.
- Dřeňovou komoru vyprázdněte pomocí exkavátoru a vymyjte irigačním roztokem. Irigaci provádějte jednorázovými jehlami s postranním otvorem.
- Pro snadný vstup do kořenového kanálku použijte dentální jehlu. Špičku jehly umístěte do kořenového kanálku drenážovaného mírným tlakem. Přetékající část odsajte pomocí aspirátoru.
- Pilník vložte do PROSIMI EDTA gelu, pokračuje v procesu čištění a tvarování. V případě potřeby aplikujte znovu, dokud není tvarování dokončeno.
- Stříkačku s gelem dobře uzavřete, pokud ji nepoužíváte.

Vedlejší účinky

Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Skladování

- Chraňte před slunečním zářením.
- Skladujte při teplotě 1 až 30 °C.
- Uchovávejte v chladném prostředí.

Upozornění

- Uchovávejte mimo dosah dětí!
- Pouze pro použití ve stomatologii!
- Dráždivý: zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.

Likvidace

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. Uložte na schválenou skládku nebo do spalovny odpadu za podmínek schválených místním úřadem.

Znečištěné obaly

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

Dodržujte pokyny v návodu k použití. Za škody způsobené nedodržením pokynů nebo stanovené oblasti použití nenese výrobce odpovědnost. Uživatel je odpovědný za testování materiálu z hlediska jeho vhodnosti pro jakýkoli účel, který není výslovně uveden v návodu. Popisy a údaje nepředstavují žádnou záruku vlastností.

Datum spotřeby

Spotřebujte do 6 měsíců od okamžiku otevření krytu stříkačky.

Datum výroby a číslo šarže jsou uvedené na horní straně obalu produktu.

Nepoužívejte po datu expirace!

Aplikační špičky jsou na jedno použití!

Balení: 1× stříkačka (3 ml)

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.

Hradištská 161

735 62 Český Těšín

info@janouch-dental.cz

+420 604 251 198



JANOUGH DENTAL

Poslední revize návodu:

Rev 01 03.07.2020 TD-02-IFU-07 Ref No:0915&0916

Přeloženo: 24.11.2022



FETİH MH. MAHİR SK. NO:5/201 | TEL. +90 444 71 30
42030 KONYA TURKEY | www.imicryl.com