

Název	Sodium Hypochlorite R&S				
Referenční číslo	3025793				
Vzhled					
Popis	• Tekutý roztok na vyplachování kořenových kanálků. • Jedná se o vodný roztok chlornanu sodného. • Při nízkých koncentracích rozpouští především nekrotickou tkáň, při vyšších koncentracích rozpouští i vitální tkáň.				
Charakteristika	Použití: • Používá se k výplachu kořenových kanálků a odstranění nekrotické tkáně při endodontickém ošetření. Odstraňte stěrovou vrstvu vhodným výplachem, jako je roztok EDTA nebo kyselina citronová 12,5 %. • Pouze pro profesionální použití. Návod k použití: Během instrumentace kanálku proplachujte chlornanem sodným podle potřeby pro debridement. 1. Naplňte stříkačku přípravkem <i>Sodium Hypochlorite</i> (doporučeno 10 ml). 2. Na stříkačku bezpečně nasadte irigační jehlu. 3. Proveďte výplach dle potřeby. 4. Vyjměte stříkačku a irigační jehlu a zlikvidujte podle předpisů. Bezpečnostní opatření: 1. Přečtěte si bezpečnostní list pro manipulaci s materiálem a bezpečnostní informace. 2. Výplach by neměl být dráždivý pro apikální oblast. 3. Zabraňte nechtěnému rozlití do okolních tkání. 4. Při manipulaci se vyhněte rozlití na barevné tkaniny a povrchy. Chlornan sodný je středně zásaditý a má bělící účinek. Upozornění: • Pozor, žíravina! • Držte mimo dosah dětí. • Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.				
Složení	<table> <tr> <td>Chlornan sodný</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>Voda a plnivo</td> <td>97.5%</td> </tr> </table>	Chlornan sodný	2.5%	Voda a plnivo	97.5%
Chlornan sodný	2.5%				
Voda a plnivo	97.5%				
Objem	500 ml				
Skladování	Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah tepla a přímého slunečního záření.				