

Profesionální domácí bělení zubů pro kosmetické použití

The Smile Soft 16% karbamid peroxid | The Smile Brilliant 6% peroxid vodíku

1. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Tento produkt je domácí bělicí systém založený na sofistikovaném gelu s čistotou farmaceutické kvality a příjemným mátovým aroma. Gel má optimální konzistenci a přilnavost k povrchu zubů a umožňuje tak postupné a rovnoměrné uvolňování účinné látky. Produkt je balen ve stříkačkách. Obsahuje také ionty draslíku, které snižují možnou citlivost zubů. pH produktu je na fyziologické hodnotě $\approx 6,7$ a zajišťuje tak ochranu skloviny. Použití tohoto produktu by mělo probíhat pod dohledem zubního lékaře. Produkt by měl být skladován při teplotě 4-8 °C.

2. NÁZEV PRODUKTU A OBSAH BALENÍ

Balení standardně obsahuje 5 stříkaček s bělicím gelem, 2 EVA fólie (Erkoflex), 5 aplikačních špiček, 3 malé štětečky a návod k použití.

The Smile Soft 16% karbamid peroxid

REF. CK16

The Smile Brilliant 6% peroxid vodíku

REF. CK06

3. URČENÉ POUŽITÍ

Přípravek se používá k bělení zubů, které potřebují světlejší a jasnější barvu, pod dohledem zubního lékaře jako platná neinvazivní alternativa k ošetření zubů fazetami apod. Vzhledem k tomu, že výplňové materiály nepodléhají bělicímu efektu, doporučuje se provést bělení zubů před provedením výplně a poté se pokusit sjednotit barvu výplní. Před zásahem do výplně je také vhodné počkat alespoň týden.

4. OBECNÉ INFORMACE

Informujte pacienta o délce denní léčby. Pečlivým dodržováním pokynů dosáhnete výsledků již po několika dnech. Ideálním předpokladem je měkký a tenký materiál nosiče (Erkodent), který je pohodlnější a také výrazně snižuje citlivost a zabírá méně meziokluzního prostoru v ústech pacienta.

5. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

1. Nepoužívejte u pacientů mladších 18 let. 2. Produkt může být prodáván výhradně zubním lékařům. Pro každý cyklus bělení musí být první aplikace provedena zubním lékařem nebo pod jeho přímým dohledem, aby byla zaručena bezpečnost. Teprve následně může být produkt zpřístupněn pacientovi k dokončení bělicího cyklu. 3. Zkontrolujte datum expirace vytištěné na vnějším obalu.

6. POSTUP

Před zahájením léčby: • Proved'te důkladnou prohlídku úst a zubů pacienta a ujistěte se, že jsou opraveny a vyřešeny všechny stávající problémy a patologie, včetně nedokonalejších nebo rozbitých výplní. • Proved'te přesnou anamnézu a přesné objektivní vyšetření. • Odstraňte existující zubní patologie. • Dokonale vyčistěte zuby. **Postup:** 1. Zhotovte nosič na míru z EVA fólií pomocí běžných laboratorních postupů. 2. Opatrně odšroubujte uzávěr stříkačky. 3. Připojte aplikační špičku ke stříkačce lehkým otočením ve směru hodinových ručiček. 4. Naplňte nosič vytlačení souvislé linie gelu přibližně do poloviny (nebo mírně pod) od incizálního okraje na přední straně nosiče, od moláru k moláru. Pro tento krok standardně stačí aplikovat 1/3 objemu stříkačky. Po použití stříkačky uzavřete a uchovávejte na chladném místě až do dalšího ošetření. Délka léčby se u jednotlivých pacientů liší. Přípravek se musí používat nejméně **3 hodiny denně** v případě **16% koncentrace karbamid peroxidu** a nejméně **2 hodiny denně** v případě **6% koncentrace peroxidu vodíku**. Případně lze aplikovat 3x, resp. 2x denně po dobu nejméně 1 hodiny. Vzácně může citlivost zubů a/nebo podráždění dásní vyžadovat lékařské ošetření. Pacienty kontrolujte po 3-5 dnech léčby. Zubní lékař rozhodne, zda bude provádět častější kontroly na základě potřeb a pokroku pacienta. Počet dní potřebných k dokončení léčby závisí především na typu zbarvení a rozhodne o něm zubní lékař na základě reakce pacienta. Orientačně se předpokládá **5-10 aplikací u 16% gelu** a **1-2 aplikace u 6% gelu**.

7. KONTRAINDIKACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kontraindikace: • Známá alergie na jednu ze složek výrobku. • Děti do 18 let • Těhotné nebo kojící ženy. • V případě, že pacient vykazuje závažné problémy s citlivostí, musí být léčba okamžitě přerušena a musí být zavedena vhodná terapie. • Neprovádějte léčbu u pacientů se závažnými problémy s dásněmi nebo stavy, které mohou způsobit citlivost zubů nebo umožnit gelu proniknout do zubu (například: osoby s již existující citlivostí, ústupem dásní, obnaženým dentinem, odhalenými kořeny, zuby s mikrotrhlinami, otevřeným kazem, uvolněnou zubní výplní).

Opatření pro použití: • Jevy omezené a dočasné demineralizace skloviny jsou běžně spojovány s jakýmkoli systémem bělení zubů. • Hodnoty mineralizace zubů pacienta se přirozeně a postupně zvýší na správné hodnoty díky přirozenému rekonstrukčnímu působení metabolismu. • Pouze pokud to zubní lékař považuje za vhodné, lze mineralizaci urychlit použitím specifických terapií po ošetření.

8. PRVNÍ POMOC

PŘI NÁHODNÉM STYKU S KŮŽÍ, MĚKKÝMI TKÁNĚMI A SLIZNICEMI: Okamžitě omyjte a důkladně a opakovaně opláchněte. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte co nejdříve odborného lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Oči omývejte tekoucí vodou po dobu 15 minut. Pokud příznaky pálení přetrvávají, vyhledejte co nejdříve odborného lékaře.

PŘI POŽITÍ: Při požití velkého množství (> 2 ml) vypláchněte ústa vodou, kloktejte slanou vodou, vypijte hodně mléka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte co nejdříve odborného lékaře.

9. SYMBOLY NA OBALU

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Kód produktu		Ohrožení zdraví
	Číslo šarže		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
	Před použitím si přečtete návod k použití		Po použití nevyhazujte do životního prostředí
	Datum expirace		Skladovací teplota
	Výrobce		Uchovávejte mimo dosah dětí

Rev.00 ze dne 6. 11. 2020

Výrobce: Health & Beauty Oasis S.r.l. | Corso Milano 83, 35139 Padova (Itálie) | DIČ 04547970287 | info@unicagroup.it

Zástupce v ČR: Janouch Dental s.r.o. | Malá Dlážka 17, 750 02 Přerov | +420 604 251 198 | info@janouch-dental.cz