

**Popis**

Zino-EG je dočasné plnivo na bázi oxidu zinečnatého a eugenolu. Výrobek odpovídá normě ISO 3107 pro materiály typu 1.

Složení

Tekutina: Eugenol (100%) (Eugenol pH 7,00 ± 0,5)

Indikace


- jako báze nebo pod výplně
- pro úlevu od bolesti, dočasný výplňový materiál
- dočasné překrytí kavity
- nepřímé překrytí zubní dřeně
- neutrální pH
- aplikace při rezistenci 25 až 30 MPa


Kontraindikace

- přímé překrytí zubní dřeně

Návod k použití**Prášek a tekutina**

- Aby byl prášek homogenní, jemně s lahvičkou zatřeste. Před otevřením poklepejte na uzávěr lahvičky. Naplňte přesně odměrku práškem a poté ihned pevně uzavřete uzávěr lahvičky.
- Promíchejte kapalinu a naneste na papír. Poté pevně uzavřete uzávěr lahvičky.

 **1 odměrka prášku + 1 kapka tekutiny**
s použitím malé odměrky

 **1 odměrka prášku + 2 kapky tekutiny**
s použitím velké odměrky

Míchání

Pomalu přidávejte malé množství prášku do tekutiny a důkladně promíchejte. Ujistěte se, že každá dávka prášku je důkladně promíchána s tekutinou. Pokračujte v přidávání prášku, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Doba míchání 1 min – 1 min 30 s

Pracovní čas
(od začátku míchání) 3 min – 4 min 30 s

Doba tuhnutí 4 min 30 s – 7 min

Doba tuhnutí v ústech 2 min

* 23 °C

Dokončení

Po zatuhnutí cementu přibližně 3 minuty po jeho nanesení lze práci dokončit. Okraje kavity by měly být před umístěním výplňového materiálu očištěny. Přípravek Zino-EG má sedativní účinek.

Vedlejší účinky

Přípravek nepoužívejte u pacientů se známou alergií na některou ze složek tohoto přípravku.

Vzájemné působení

Přípravek nepoužívejte v kombinaci s dentálními materiály na bázi (meth)akrylátu, protože může narušovat jejich tuhnutí.

Skladování

Neskladujte v blízkosti materiálů obsahujících složky (meth)akrylátové pryskyřice. Chraňte před vlhkostí. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po datu spotřeby. Před použitím nechte materiál dosáhnout pokojové teploty.

Trvanlivost

Viz obal produktu.

Likvidace

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. Uložte na schválenou skládku nebo do spalovny odpadu za podmínek schválených místním úřadem.

Znečištěné obaly

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

Upozornění

Obsahuje tekutý eugenol. Přípravek může dráždit oči, způsobit alergickou kontaktní dermatitidu v ústní sliznici a citlivost.

- Zamezte kontaktu s očima, abyste předešli podráždění a možnému poškození rohovky. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Zamezte kontaktu s pokožkou, abyste předešli podráždění a možné alergické reakci. V případě kontaktu se na kůži může objevit zarudnutí. Postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou a očistěte alkoholem.
- Nemíchejte práškové a tekuté složky tohoto přípravku se složkami jiného cementu.

Balení

- prášek 75 g / tekutina 20 ml
- aplikátory


Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



Poslední revize návodu:

Rev 01 03.07.2020 TD-03-IFU-04.1 Ref No:2086

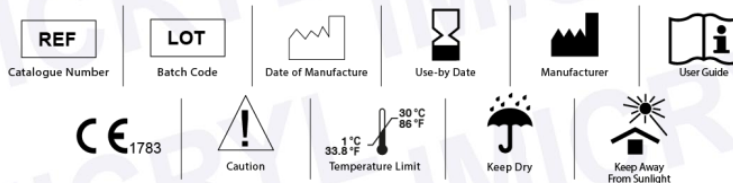

IMICRYL®
BY MULTIMED SPA - S.p.A.

FETİH MH. MAHIR SK. NO:5/201 | TEL. +90 444 71 30
42030 KONYA TURKEY | www.imicryl.com